

boso TM-2450

Døgnblodtryksmåler
Varenummer 0011.0009

1) PROGRAMMERING AF ENHEDEN FØR HVER PATIENT

Inden brug skal enheden altid gøres klar til den kommende patient, dette sker via den tilhørende software boso profil-manager XD, hvor patientens data oprettes og programmeringen til ønskede målinger indstilles. Vær opmærksom på, at tidligere patienters data slettes fra selve måleapparatet, når en ny patient programmeres ind.

- Tilslut TM-2450 apparatet til PC via USB-kabel.
- Start programmet boso profil-manager XD. Det ligger sandsynligvis med boso ikon på PC'ens skrivebord. Se evt. vejledningen til installation, CD er leveret med apparatet.
- Tjek at der øverst til højre står 24h-måling, ellers klik anvendelse og 24h-måling.
- Sørg for at være på fanen patient og vælg den ønskede patient, eller klik på Ny. Indtast data for den nye patient. Efterfølgende kan patientens data rettes eller slettes ved at højre klikke på patienten.
- Tjek at den ønskede patients data står øverst i billedet.
- Klik - måledata i menuen lige under patientdata.
- Klik - programmer i nederste højre hjørne
- Standardindstillingerne vises. Ønskes andre indstillinger til den enkelte patient, er det her indstillingerne kan ændres fx. tidspunkter for dag/nat, måleintervaller eller maksimal oppumpningshøjde. Klik ok.
- Boksen med Attention, viser at tidligere programmering af TM-2450-enheden slettes og erstattes med programmeringen for den nye patient.
- TM-2450 enheden er nu klar til brug, og kan frakobles PC.

Medfølger
manchetter
str. M og L

2) BOSO TM-2450-ENHED OG MANCHETTE

- Placer manchetten på patientens arm, så det gule mærke ligger over arteria brachialis.
Ledningen vender opad og lægges bag patientens nakke. Lufttilslutningen tilsluttes boso TM-2450 apparatet. Brug overarmsmanchette, der passer både patient og boso TM-2450.
- Sørg for, at der er batteri på og tænd displayet ved et tryk på START/STOP.
- Lav en testmåling og tryk på START/STOP knappen på TM-2450 enheden. (går den ikke i gang så tryk en ekstra gang på START/STOP).
- Start døgnmålingen med de valgte intervaller ved at holde den sorte autoknap nede til der lyder et lille bip og et ur-ikon vises i displayet. Målingerne er nu startet og første automatiske måling starter efter det valgte interval (standard 15 min).
- Der kan laves ekstra manuelle målinger mellem de planlagte ved at aktivere displayet på START/STOP og derefter sætte en måling i gang på START/STOP.
- Displayet vil gå ud efter noget tid, det betyder ikke noget. Det tændes ved tryk på START/STOP.

Apparatet pumper automatisk manchetten til et passende niveau, er det ikke nok pumper den igen med yderligere 60 mmHg (maks 300 mmHg). Via softwaren er det muligt at indstille til et andet maksniveau.

3) INDLÆSNING AF DATA TIL PC

- Forbind TM-2450 enheden og PC via USB-kabel.
- Start boso profil-manager XD.-
- Vælg den patient, hvis data skal indlæses.
- Klik Måledata i øverste menu under patientdata.
- Klik Indlæs måleværdier, findes i nederste højre hjørne.
- Softwaren tilbyder at slette data fra enheden med det samme, hvis ja vælges er måleapparatet tomt for data.
- I menuerne øverst under patientdata kan findes alle måledata, grafiske og statistikker
- Overfør, print eller gem data som PDF.



VED KØB AF BOSO TM-2450 MODTAGER DU FØLGENDE:



24-timers blodtryksmåleapparat
boso TM-2450



Batterioplader



Æske



Overarmsmanchetter til voksne
Str. M (20-31 cm)

Hoftetaske
Med bæltestropper og



Manualer
- boso TM-2450
- profil-manager XD
- vigtig information

CD-ROM
-boso profil-manager XD



USB-kabel