

In-Check™ DIAL

Inhalator

Varenummer 0015.2000



ANVENDELSE

Non-invasiv træning og kontrol af inhalator-teknik. Inhalatoren simulerer modstanden fra inhalatorenheder (MDI og DPI-kategorier), således at det hurtigt kan identificeres, om patienten har den korrekte inhalator-teknik.

Farveindikation af anvendelige medicintyper, der vil fungere til den enkelte patient. Enheden er let at anvende for både børn og voksne, og anvendes for at sikre bedre lungedeposition og minimere medicinsk spild.

Anvendes med engangsmundstykker.

Kalibreret, klinisk testet og overholder AS/NZS-standarden.

QUICKGUIDE

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

1. Nulstil før brug.
2. Hold instrumentet lodret med mundstykket opad.
3. Bank den runde ende mod en håndflade eller en anden fast vandret overflade. Dette bank vil løsne den magnetiske nulstillingsvægt, og den røde markør vil vende tilbage til startposition.
4. Instrumentet skal nu vendes 180 grader for at få den magnetiske vægt tilbage til hvileposition.
5. Aflæs hvilken modstand, der skal måles med. På siden af enheden er de mest gængse inhalatorer vist i en oversigt over, ved hvilken modstand der skal måles på for den enkelte inhalator. Modstanden er vist med symboler, der går igen ved mundstykket.
6. Modstand indstilles øverst på instrumentet ved mundstykket. Den kan indstilles til seks forskellige modstande, der vises med symboler.
7. Sæt et rent engangsmundstykke på og apparatet er klar til måling.
8. Patienten skal ånde helt ud, inden læberne lukkes om mundstykket. Uden at puste ud, skal der nu suges som det anbefales af producenten af den givne inhalator.
9. Registrer inhaleringsflowet ved den røde markørs placering på skalaen. Nulstil og gentag et par gange.
10. På instrumentet er flowområder for inhalatorerne vist og markeret med rød/grøn, her kan aflæses om patientens inhalationsevne stemmer overens med den givne inhalator eller der skal overvejes en anden type.

RENGØRING

OBS: For udførlig instruktion i rengøring og sterilisation - se manualen, der følger med produktet.

Ved personligt brug af kun en patient

1. Nedsenk i lunt vand med mildt opvaskemiddel i 2-3 minutter (max 5 min).
2. Ryst instrumentet for at sikre grundig rengøring.
3. Skyl grundigt efter med varmt vand
4. Ryst for at fjerne overskydende vand ved at holde på enden, som er længst fra omskifter enheden.
5. Lad instrumentet tørre fuldstændigt, inden den bruges igen.

Ved brug af flere patienter

Instrumentet kan steriliseres ved anvendelse til forskellige patienter. Se manualen og producentens anvisninger for anbefalede hydrogenperoxid-produkter og kontakttider.

**Anvend
engangs-
mundstykke**

Nulstil ikke ved, at
ved at ryste/slå i anden
retning end anvist, da det kan
forårsage skader på stempel
og markør.



Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com | www.hounisen.com