


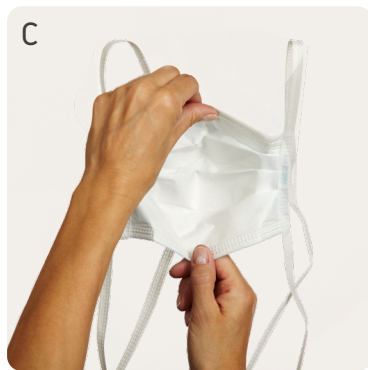

Påtagningsvejledning: Maske med visir

Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en stænkresistent medicinsk ansigtsmaske med visir eller en stænkresistent medicinsk ansigtsmaske og briller/visir.

- A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene
- B. Form næseklemmen
- C. Hiv i masken for oven og for neden for at folde masken helt ud
- D. Placér masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund
- E. Placér de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage

- F. Placér de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt
- G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem
- H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation
- I. Smid masken væk efter brug

Læs mere på www.molnlycke.com/da-dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10, info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2025 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU1702508


Mölnlycke®