


# S-Sedivette®

## QuickGuide

- 1** Indsaml blod ved hjælp af aspirationsmetoden, ved at fastgøre S-Sedivette® til en sikkerhedsnål umiddelbart før indsamling.




- 2** Fortsæt med blodindsamling i overensstemmelse med interne instruktioner.

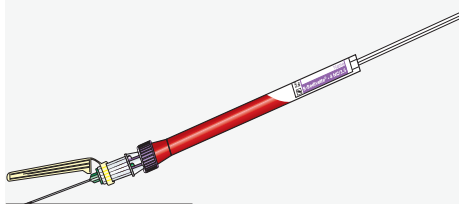


- 3** Efter blodopsamling låses stempet ind i S-Sedivette® bunden og stempelstangen brydes af.



- 4** Bland prøven grundigt umiddelbart efter blodindsamling ved at vende S-Sedivette® 5 gange på hovedet. Ryst ikke. Sørg for, at luftboblen / glasperlen altid bevæger sig fra den ene ende til den anden.

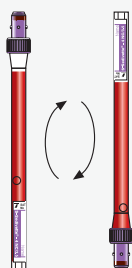

- 5** ESR-bestemmelse bør foretages inden 4 timer efter blodindsamling. Vend / bland S-Sedivette® grundigt igen inden ESR-bestemmelse, og placer den i S-Sedivette® stativ. Brug den røde tommelfingerskrue til at justere hver prøve til nul.

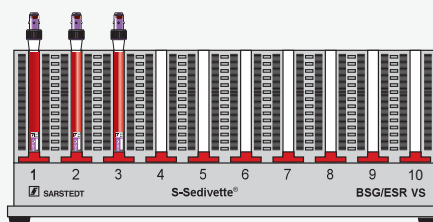


## Instruktioner til mærkning af strekkoder:



Vigtigt: Fastgør etiketten i bunden af S-Sedivette®.

**Korrekt !**

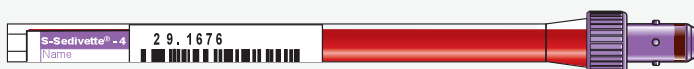

**Forkert !**



**Forkert !**

SARSTEDT AG & Co.  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone +49 2293 305-0  
Fax +49 2293 305-122  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**