

# BRUGERVEJLEDNING

## Medicinske mundbind (ikke-sterile)

CE godkendt EN ISO 93/427EEC

Klassifikation: EN14683:2019

Type II



**Inden mundbindet tages i brug:** Vask eller sprit hænderne af før berøring af masken.

**Sådan tages masken på:**



1. Åben pakken og identificer den hvide side af masken, som er indersiden. Siden med næseklemmen er toppen af mundbindet. Placér masken over din næse og mund med den hvide side indad.
2. Placér elastikstropperne bag hvert øre og sikre dig herefter, at masken sidder lige, at den dækker både mund og næseryg, og at den blå side vender udad.
3. Juster næseklemmen, så den tilpasses og sidder så tæt på næseryggen som muligt.
4. Træk i den nederste del af masken, indtil masken dækker fra næseryggen til under hagen.

### **Bemærk venligst:**

Masken er til engangsbrug og kan ikke genbruges. Erstat din maske med en ny, hvis den bliver våd.