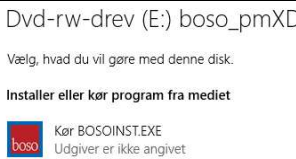
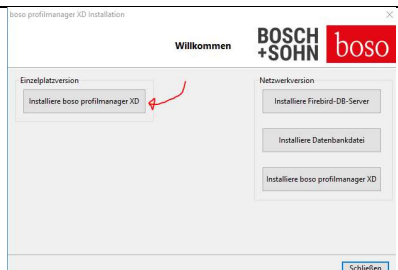
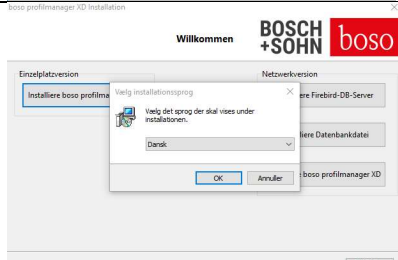
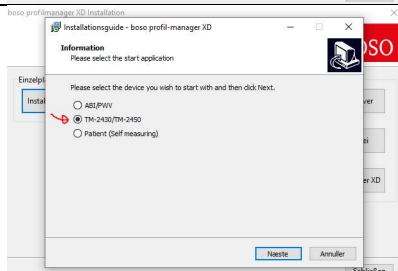
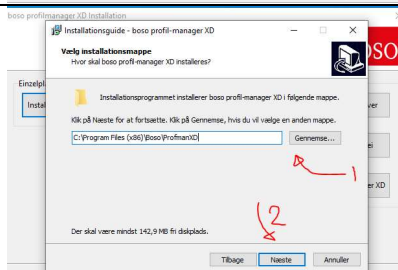
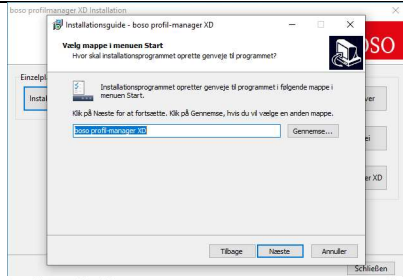
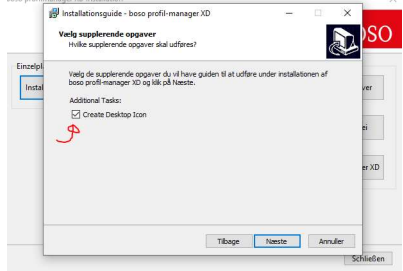
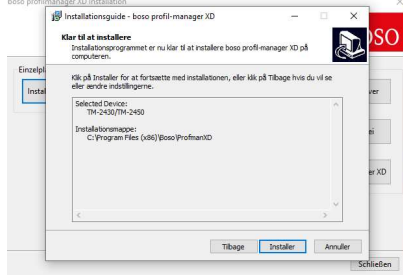



Installation af boso TM-2450 software: boso profil managerXD

Instruktion	Skærbillede
<p>Indsæt medfølgende CD i PC</p> <p>→ Klik - Kør BOSOINST:EXE</p>	<p>Dvd-rw-drev (E:) boso_pmXD</p> <p>Vælg, hvad du vil gøre med denne disk.</p> <p>Installer eller kør program fra mediet</p> 
<p>→ Klik - Installere boso profilmanager XD</p>	
<p>→ Vælg det sprog du gerne vil have programmet til at anvende fremover.</p> <p>→ Klik - ok</p>	
<p>→ Vælg TM-2430/TM-2450</p> <p>→ Klik - Næste</p>	
<p>→ Vælg hvor programmet skal placeres på PC'en, under gennemse. Hvis du vil anvende den af programmet forslåede placering, gå direkte videre.</p> <p>→ Klik - næste</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ➔ Programmet laver en genvej på PC ➔ Klik næste ➔ Programmet laver en genvej på skrivebordet. Ønskes dette ikke, fjern markering i boks. ➔ Klik næste 	 
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Programmet er klar til installation ➔ Klik Installer 	
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Boso ikonet kan nu findes på skrivebordet klar til brug. 	
<p>Hvis denne boks stadig vises, klik Schließen og den lukkes.</p>	