

boso medicus uno



**Bruks-
anvisning**



2

**Brugs-
anvisning**



39

**Käyttö-
ohje**



76

**Kasutus-
juhend**



113

**Instrukcja
obsługi**



150

**Használati
útmutató**



187

Indholdsfortegnelse

39

Oversigt over apparatet	41
Pakkens indhold.....	42
Symboler på blodtryksmåleren.....	43
Symboler på strømforsyningsenheden.....	46
Kort vejledning.....	47
Indledning	48
Formålsbestemt anvendelse	49
Blodtryksværdier	50
Systolisk og diastolisk blodtryk	50
WHO's grænseværdier for vurdering af blodtryk	50
Ibrugtagning af apparatet	52
Isættelse af batterier	52
Statusvisning for batteri.....	53
Batteriskift.....	53
Generelle anvisninger til egen måling af blodtryk	54
Forberedelse af blodtryksmåling	56



40 Indholdsfortegnelse

Bemærkning til manchetstørrelse.....	56
Anlæggelse af manchetten	57
Blodtryksmåling.....	60
Afbrydelse af måling.....	61
Visning af måleværdi	62
Læsning af de sidste måleresultater	64
Brug med netstrøm	65
Fejlvisning	66
Rengøring og desinfektion	68
Garantibetingelser	69
Kundeservice / Bortskaffelse	70
Tekniske data.....	71
Anvisning til måleteknisk kontrol (kun til fagligt uddannet personale).....	74



42 Pakkens indhold

1 Blodtryksmåler
boso-medicus uno



4 Batterier LR 6 (AA)



1 Standardmanchet
CA 01



1 Brugsanvisning



1 Blodtrykspas



Symboler på blodtryksmåleren

43

Symbol	funktion/betydning
	START/STOP-knap
	Jævnstrøm
	Serienummer
	Produktionsår
	Type BF: Apparat, manchete og slanger er blevet udviklet således, at patienten er beskyttet mod elektrisk stød.
	Måling er i gang. Blinker, så snart pulsen registreres.



44 Symboler på blodtryksmåleren

Symbol	funktion/betydning
((♥))	Hjerterytmeforstyrrelse eller bevægelse under måling
M	Gemt værdi
	Batteri er fuldstændigt opladet.
	Batteri er delvist afladet.
	Udskift batteri snarest.
	Blinker! Måling ikke mulig. Udskift batterier.
	Beskyttes mod fugtighed

Symboler på blodtryksmåleren

45

Symbol	funktion/betydning
<i>SYS</i>	Systolisk blodtryk i mmHg
<i>DIA</i>	Diastolisk blodtryk i mmHg
<i>PUL</i>	Puls pr. minut
CE 0124	Apparatet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv om medicinsk udstyr.
	Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
	Producent
	Læs brugsanvisningen
	Strømforsyningsenhedens tilslutningsstik og polaritet

DA

46 Symboler på strømforsyningsenheden

Symbol	funktion/betydning
	Kun til brug i lukkede rum.
	Apparat i beskyttelsesklasse II
	Termosikring
	Sikkerhed
	Apparatet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv om medicinsk udstyr
	Strømstikkets polaritet

- ➔ Anbring batterierne, sørg for korrekt polaritet (s. 52)
- ➔ Forbind manchet med blodtryksmåleren (s. 56)
- ➔ Anlæg manchetten (s. 57)
- ➔ Start (og afbrydelse) af en måling ved at trykke på START-knappen. (s. 60)

Måleværdier systole, diastole og puls vises efter målingen (s. 62)

- ➔ Åbning af hukommelsen (s. 64): På det slukkede apparat trykkes på START-knappen i 3 sekunder, indtil der vises "M" på displayet.



Denne korte vejledning erstatter ikke de i brugsanvisningen indeholdte detaljerede informationer om sikkerheden og håndtering af blodtryksmåleren.



Derfor skal brugsanvisningen læses omhyggeligt!

DA

48 Indledning

DA

Kære kunde, det glæder os, at du har besluttet dig for at købe en boso-blodtryksmåler. Mærket boso står for højeste kvalitet og præcision. Også personer med medicinsk uddannelse foretrækker denne blodtryksmåler: 96 % af alle alment praktiserende læger, praktiserende læger og internmedicinere arbejder på klinikken med blodtryksmålere fra boso (API-studie udført af det tyske forskningsinstitut GfK 01/2016). Årelang erfaring fra medicinere er implementeret i alle vores apparater til egen måling i hjemmet.

Dette apparat har været igennem strenge kvalitetskontroller og er derved en sikker partner til kontrol af dit blodtryk.

 Læs venligst denne brugsanvisning før apparatet tages i brug første gang, da en korrekt måling af blodtrykket kun er mulig ved korrekt håndtering af apparatet.

I denne brugsanvisning benyttes „➡“, der illustrerer en aktion, som brugeren skal udføre.

For at få hjælp til ibrugtagning, brug eller vedligeholdelse bedes du henvende dig til forhandleren eller til producenten (kontaktdata står på det bageste omslag i brugsanvisningen).

En uventet driftstilstand eller hændelse, der har forringet eller eventuelt kan forringe helbredstilstanden, skal omgående indberettes til producenten.

Ved salg af apparatet skal denne brugsanvisning vedlægges.

Indledning

Blodtryksmåleren boso-medicus uno er egnet til patienter med et overarmsomfang mellem 22 og 48 cm.

Brug af tilbehør, som ikke er nævnt i denne brugsanvisning, kan nedsætte sikkerheden.

Blodtryksmåleren kan forstyrres af trådløst kommunikationsudstyr som f.eks. trådløse routere, mobiltelefoner, trådløse fastnettelefoner og disses basisstationer eller walkie-talkier. Der skal derfor holdes en afstand til den slags udstyr på normalt 3,3 m.

Anvendelsesformål

49

Ikke-invasiv registrering af det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsfrekvensen på voksne personer.

Ikke egnet til brug på nyfødte og småbørn. Apparat er egnet til brug til egen måling i hjemmet. Patienten er bruger.

Apparatet kan anvendes med det overarmsomfang, som er angivet på den tilhørende manchete.



50 Blodtryksværdier

For at bestemme blodtrykket, skal der måles **to værdier**:

- **Systolisk (øvre) blodtryksværdi:**

Denne værdi registreres, når hjertemusklen trækker sig sammen og trykker blodet ud i blodkarrene.

- **Diastolisk (nedre) blodtryksværdi:**

Denne værdi foreligger, når hjertemusklen udvides og fyldes med blod på ny.

Måleværdier for blodtryk udtrykkes traditionelt i mmHg (mm kviksølv søjle).

DA

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fastlagt følgende grænseværdier for vurderingen af blodtryksværdier:

	systolisk	diastolisk
Entydigt for højt blodtryk (hypertoni)	fra 140 mmHg	fra 90 mmHg
Stadig normalt blodtryk	130 til 139 mmHg	85 til 89 mmHg
Normalt blodtryk	120 til 129 mmHg	80 til 84 mmHg
Optimalt blodtryk	op til 119 mmHg	til 79 mmHg

Hvornår en medicinsk behandling er nødvendig afhænger ikke alene af blodtrykket, men også af patientens risikoprofil. Kontakt venligst din læge, hvis blot en af de to værdier (systole, diastole) permanent ligger over grænseværdierne for entydigt for højt blodtryk.


Ved egen blodtryksmåling i hjemmet registreres hyppigt noget lavere værdier end hos lægen. Derfor har den tyske "Deutsche Hochdruckliga" fastlagt følgende lavere grænseværdier ved måling i hjemmet:

Måling hjemme:	135/85 mmHg
Måling hos lægen:	140/90 mmHg



52 Ibrugtagning af apparatet

Apparatet skal installeres og idriftsættes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning.

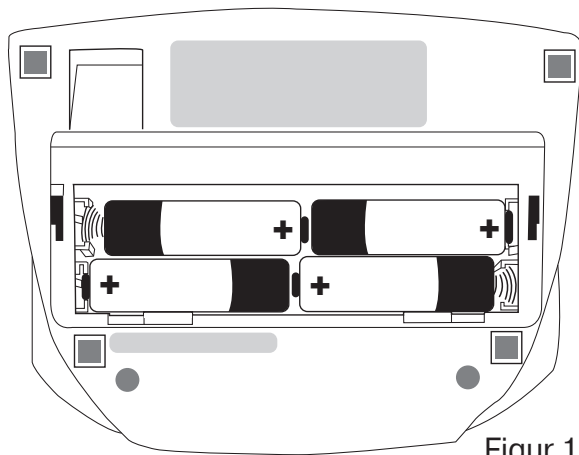

Figur 1

- ➔ Benyt udelukkende højt kvalitative, lækagesikre batterier med den angivne specifikation (se „Tekniske data” s. 71).

⚠ Bland **aldrig** gamle og nye batterier eller forskellige fabrikater.

⚠ Ved forkert polaritet fungerer apparatet ikke. Der kan opstå varmedannelse, eller batterierne kan lække og dermed ødelægge apparatet.

➔ Isættelse af batterier

Batterirummet befinder sig på undersiden af apparatet. Anbring batterierne i batterirummet som illustreret på figur 1.

- ➔ Såfremt apparatet skal opbevares i længere tid, skal batterierne fjernes.

⚠ Såfremt batterierne kortsluttes, kan de blive meget varme og medføre forbrændinger.

Apparatet har en statusvisning for batteriets opladningstilstand (se s. 44)

 Batteri er fuldstændigt opladet.

 Batteri er delvist afladet.

 Udskift batteri snarest.

 Blinker! Ingen måling mulig.
Udskift batterier.

 **Batteriskift må kun foretages, når apparatet er slukket!**

Hvis batterierne fjernes permanent (længere end 30 sek.), slettes hukommelsen med måleværdierne! Hvis batterierne fjernes i måle- eller gemmemodus, slettes hukommelsen med måleværdierne omgående!

 **Hjælp med at beskytte miljøet**

Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Du kan aflevere de gamle batterier på et indsamlingssted for batterier eller specialaffald. Kontakt venligst din kommune for oplysninger.



54 Generelle anvisninger til egen måling af blodtryk

DA

1. Svingende blodtryk er normalt. Selv ved en gentagen måling kan der forekomme betydelige forskelle. Enkelte eller uregelmæssige målinger leverer ingen pålidelig værdi for det faktiske blodtryk. En pålidelig vurdering er kun mulig, hvis du måler blodtrykket jævnligt under sammenlignelige betingelser, og skriver måleværdierne op i blodtrykspasset.
2.  Egen måling af blodtrykket er ikke ensbetydende med en behandling. Du må **aldrig** på egen hånd ændre på den af lægen ordinerede medicin og dosis..
3. Hjerterytmeforstyrrelser kan reducere apparatets målenøjagtighed, eller resultere i ukorrekte målinger (se side 67).
4. Ved patienter med svag puls (mulig f.eks. patienter med pacemakere) kan der opstå ukorrekte målinger. Blodtryksmåleren har ingen indflydelse på pacemakeren.
5. Apparatet er ikke blevet valideret til brug på gravide kvinder.
6. Målingen skal altid foretages i hvilestilling.
Det anbefales at kontrollere blodtrykket to gange dagligt - om morgenen efter, at du er stået op, og om aftenen, når du har fået slappet af efter arbejdet.

7. Blodtrykket skal (hvis der ikke foreligger begrænsninger (se side 58)) altid måles på armen med de højeste måletrykværdier. Hertil måles først blodtrykket på begge arme og derefter altid på den arm, som har det højeste blodtryk.



56 Forberedelse af blodtryksmåling

Bemærkning til manchetstørrelse:

 Apparatet må kun anvendes med følgende manchetter. De skal vælges i overensstemmelse med det påtrykte overarms-omfang.

DA

Type	armomfang	bestillingsnummer
CA01	22 – 32 cm	143-4-764*
CA02	32 – 48 cm	143-4-757

* leveres med standardpakken.

Forbind manchetten med apparatet. Det gøres ved at trykke stikket (skal gå i hak) ind i bøsningen på den venstre side af apparatet. (Se figur 2).



Figur 2

Følgende skal overholdes ved måling af blodtrykket:



Undgå nikotin og kaffe en time, inden blodtrykket måles.



Sæt dig, så du sidder behageligt, når blodtrykket måles. Læn dig tilbage og læg armene på armlænet. Anbring ikke benene over kors. Anbring fødderne fladt på gulvet. Slap først af i 5 minutter, før du påbegynder målingen. Du må ikke bevæge dig under målingen.

Anlæggelse af manchetten

Målingen gennemføres på den nøgne overarm.




Sørg for, at armen ikke snøres ind pga. for stram skjorte eller bluse, når ærmet rulles op (eventuelt kan skjorten eller blusen tages af før målingen).



➔ Før den åbne manchet, der er formet som en ring, over overarmen indtil den nederste manchetkant er ca. 2-3 cm over albueleddet. Manchetten skal være anbragt således, at markeringen ligger på arterien (se figur 3).

58 Forberedelse af blodtryksmåling

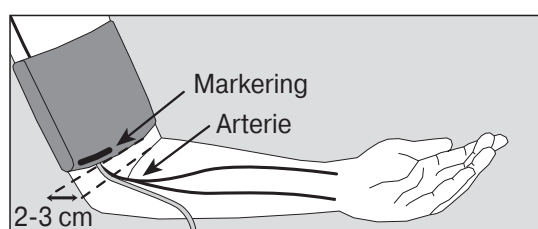

Figur 3

DA

⚠ Manchetten må ikke lægges på sår, da det kan medføre yderligere læsioner.

⚠ Vær især opmærksom på, at manchetten ikke må lægges på en arm, hvor arterierne eller venerne er eller har været i medicinsk behandling (f.eks. shunt).

⚠ På kvinder med amputeret bryst må manchetten ikke anbringes på armen på den side af kroppen, hvor brystet er fjernet.


⚠ Under målingen kan der opstå fejlfunktioner på medicinsk udstyr, som anvendes på samme tid på samme arm.

⚠ Manchetten må ikke ligge for stramt på. Der skal kunne være ca. to fingre mellem arm og manchet.

⚠ Metalbøjlen må **aldrig** ligge over en arterie (se figur 3), da måleværdierne ellers kan forvanskes.

➔ Træk i manchetenden, der føres igennem metalbøjlen, og anbring det udvendigt omkring overarmen. Burrebåndet hæftes fast ved at trykke let herpå.

- ➔ Læg armen med den påsatte manchet afslappet og en smule vinklet på bordet, således at manchetten er på højde med hjertet.

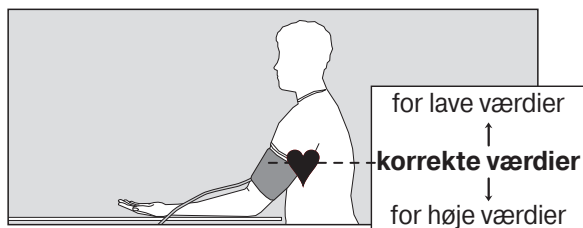

Figur 4



Under målingen må der ikke tales.

- ⚠ Sørg for, at der ikke er et knæk på luftslangen under målingen. Det kan medføre for kraftig oppumpning med læsioner til følge.

- ⚠ Blodmløbet må ikke hæmmes unødigt længe (> 2 minutter). I tilfælde af en

fejlfunction i apparatet skal manchetten tages af armen.

- ⚠ For hyppige målinger kan som følge af det nedsatte blodmløb medføre personskader.

- ⚠ Apparatet må ikke benyttes af børn uden opsyn.

- ⚠ Benyt aldrig apparatet i nærheden af spædbørn. Det kan medføre uheld eller beskadigelser.

- ⚠ Apparatet må ikke startes uden pålagt manchet.

- ⚠ Apparatet har små dele, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de ved en fejltagelse sluges af spædbørn.



60 Forberedelse af blodtryksmåling

⚠ Såfremt den omgivende temperatur ændrer sig betydeligt, skal apparatet hvile i ca. en time for at tilpasse sig den nye omgivelsestemperatur, før du anvender apparatet.


⚠ Hold nu armen fuldstændig i ro og snak ikke.

Til funktionskontrol vises kort samtlige visningselementer i LCD-displayet (se figur 5).

⚠ Apparatets effekt kan eventuelt forringes ved for høj temperatur, fugt eller højde.

Blodtryksmåling

➔ Start målingen med START-knappen

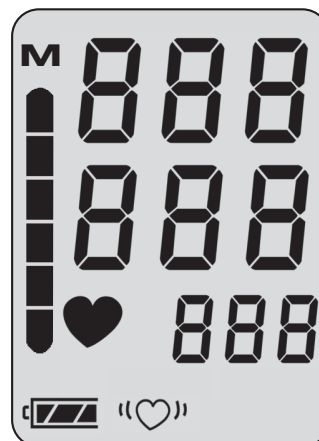

Figur 5

Pumpen begynder at pumpe manchetten op.

Apparatet har en intelligent oppumpnings-automatik til skånsom oppumpning til det korrekte manchettryk. Det stigende manchettryk vises.

Når det **påkrævede tryk** er nået, frakobles pumpen, og luften udledes langsomt af manchetten.



Afbrydelse af måling:

En måling kan til enhver tid afbrydes. Det gøres ved at trykke på START-knappen, når målingen er igang. Herefter ledes luften automatisk ud af manchetten.

Under målefasen vises det faldende manchettryk og det blinkende ♥ symbol (se figur 6).



Figur 6



62 Visning af måleværdi

Når målingen er færdig, åbnes automatisk den monterede ventil til hurtig udledning af luft i manchetten.

De målte blodtryksværdier (systole, diastole, puls) vises (se figur 7).



Figur 7

Målingen gemmes automatisk.

Fejlmålinger med visningen "Err" (se side 66) gemmes ikke.

Hvis der efter målingen vises symbolet "♡", anbefales det at foretage en ny måling. Armen skal holdes fuldstændig i ro. Den gentagne visning af symbolet "♡", når armen holdes i ro, kan være et tegn på hjerterytmeforstyrrelser. Drøft dette med din læge ved næste konsultation.

Blodtrykket er en dynamisk størrelse, der kan påvirkes af patientens kropsholdning, som f.eks. en siddende, stående eller liggende position, fysisk aktivitet før eller under målingen, helbredstilstand (anspændthed, stress, sygdom ...).

- ➔ Ved åbenlyst forkerte måleværdier gentages målingen.

Efter ca. 1 minut slukker apparatet automatisk. For at udføre en gentagen måling skal der trykkes **kort** på START-knappen.



Lad der gå to minutter mellem to målinger.


- ➔ Hvis der ikke ønskes yderligere målinger, tages manchetten af armen.



64 Læsning af de sidste måleresultater

For at få vist den sidst udførte måling, skal START-knappen holdes nedtrykket i ca. 3 sekunder. Apparatet skal være slukket.

Resultatet af den sidst udførte måling vises i ca. 3 sekunder. Efterfølgende slukker apparatet automatisk (se figur 8).

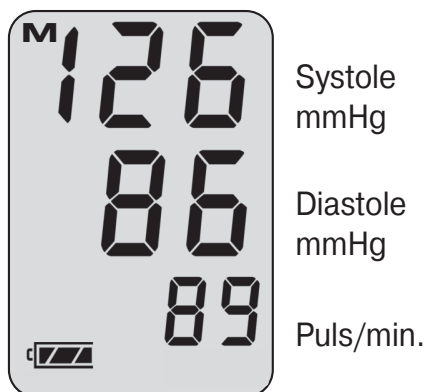

Figur 8

➔ Skriv hver enkeltværdi i dit blodtrykpas.

➔ Ved at trykke på START-knappen igen startes en ny måling.

⚠ Hvis batterierne udskiftes, når apparatet er tændt, kan data gå tabt

(se side 53, batteriskift må kun udføres, når apparatet er slukket).

På bagsiden af apparatet sidder tilslutningsstikket til strømforsyningsenheden. Anvend udelukkende boso-strømforsyningsenheden (**bestillingsnr. 410-7-150**). Denne strømforsyningsenhed er tilpasset spændingen nøjagtigt, er stabiliseret og med korrekt polaritet. Fremmede strømforsyningsenheder kan forårsage en skade på elektronikken og have til følge, at fabriksgarantien ikke dækker. Desuden udgør fremmede strømforsyningsenheder en brandrisiko.

 Er der **ingen** batterier i apparatet, **slettes** hukommelsen med måleværdierne, når apparatet frakobles strømmen.

 Hvis der er fulde batterier i apparatet, slettes hukommelsen med måleværdierne **ikke** når apparatet frakobles strømmen.

➔ **Frakobling af strøm:**

Når apparatet er slukket, skal tilslutningsstikket

først frakobles blodtryksmåleren **herefter** skal strømforsyningsenheden tages ud af stikdåsen



 Berør ikke batterierne, tilslutningsstikkene til strømforsyningsenheden og patienten på samme tid.

 Træk strømstikket ud af blodtryksmåleren, når den ikke benyttes.

66 Fejlvisning

Såfremt der opstår problemer, så vises en fejl i stedet for måleresultatet.

Fejlvisningernes betydning:



Fejlårsag ved visning af Err :		Afhjælpning af fejl:
A grey rounded square button with the text 'Err' in a stylized, handwritten font.	Stærkt svingende manchettryk under målingen	Hold armen i ro
	For svag puls til at gennemføre måling	Kontrollér manchettens placering (se side 57) og gentag målingen.
	Difference systole - diastole for lav: Systole – Diastole ≤ 10 mmHg	Kontrollér manchettens placering (se side 57) og gentag målingen.
Fejlårsag ved visning af Err CuF :		Afhjælpning af fejl:
A grey rounded square button with the text 'Err CuF' in a stylized, handwritten font.	Fejl ved oppumpning	Manchetten er muligvis for løst anlagt og skal strammes (se side 58)

	“♥” Display: Afhjælpning af fejl: Gentagne måling anbefales; hold samtidig armen fuldstændig i ro. Den gentagne visning af symbolet “♥”, når armen holdes i ro, kan være et tegn på hjerterytme- styrrelser. Drøft dette med din læge ved næste konsultation.
---	--



68 Rengøring og desinfektion

Rengøring af apparatet:

Rengøring af apparatet foretages med en blød, tør klud.

Rengøring af manchetten:

Små pletter på manchetten fjernes forsigtigt med almindeligt opvaskemiddel.

The logo consists of the letters 'DA' in a bold, sans-serif font, enclosed within a white circle. This circle is centered on a dark gray square background.

Desinfektion:

Til desinfektion ved aftørring af apparatet (indvirkningstid mindst 5 minutter) anbefales desinfektionsmidlet antisept liquid (Schülke & Mayr). Til desinfektion af manchetten anbefaler vi spray-desinfektion. Især hvis apparatet benyttes af flere patienter, bør manchetten rengøres og desinficeres regelmæssigt.

På dette produkt yder vi 3 års fabriksgaranti fra og med købsdato. Købsdato skal dokumenteres med fakturaen. Inden for garantitiden afhjælpes mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl uden omkostninger for dig. Hvis der gøres brug af garantien forlænges garantitiden ikke for hele apparatet, men kun for de udskiftede komponenter.

Undtaget for garantien er slid på komponenterne (f.eks. manchetten), transport-skader samt alle skader, som er opstået ved ukorrekt håndtering (f.eks. tilsidesættelse af brugsanvisningen) eller er en følge af uautoriseret indgreb i apparatet. Der kan ikke anføres grunde til støtte for skadeserstatning mod os.

Købers lovmæssige krav i forbindelse med en reklamation iht. § 437 BGB (den tyske civilretlige lovbog) begrænses ikke.

I tilfælde af, at der gøres krav på garantien, skal apparatet sendes sammen med den originale købsdokumentation til:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstr. 64,
72417 Jungingen,
GERMANY.



70 Kundeservice

Kundeservice:

Garanti- og reparationsarbejde skal udføres af uddannet og autoriseret personale. Der må ikke foretages ændringer på dette udstyr uden tilladelse fra producenten. Send apparatet omhyggeligt emballeret og med tilstrækkelig porto til din autoriserede forhandler eller direkte til:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceafdeling
Bahnhofstraße 64,
72417 Jungingen,
GERMANY
Tlf.: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

DA

Bortskaffelse



Apparatet og batterierne må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet.

Det udtjente apparat skal afleveres på en kommunal miljøstation eller til den forhandler, hvor det er købt.

Brugte og genopladelige batterier skal bortskaffes separat. (Indsamlingssted i din kommune).

Forventet levetid af apparatet: 10 år

Forventet levetid af manchetten: 10.000 målinger

Tekniske data

71

Måleprincip:	Oscillometri
Måleinterval:	40-240 mmHg, 40-200 puls/min.
Manchettryk:	0 til 299 mmHg
Antal målinger i hukommelse:	1 måling
Display:	LCD
Driftsbetingelser:	Omgivelsestemperatur +10 °C til +40 °C rel. Luftfugtighed 15 til 85 % Luftryk: 800 hPa til 1060 hPa
Transport/ Opbevaringsbetingelser:	Omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C rel. Luftfugtighed 10 til 95 % Luftryk: 700 hPa til 1060 hPa

DA

72 Tekniske data

**Typisk levetid
batterierne:**

1.000 målecykluser (afhængig af oppumpningshøjden og
brugsfrekvens)

Batterikontrol:

Symbolvisning i display

Vægt:

290 g uden batterier

Mål (B x H x D):

150 mm x 65 mm x 115 mm

Klassifikation:

Medicinsk udstyr med intern energikilde (i batteri-
drift) / klasse II (i drift med strømforsyningsenhed),
Kontinuerlig driftsmodus

**Beskyttelse mod
fremmedlegeme:**

IP20
IP-klassificeringen er beskyttelsesklassen, som
består af huse iht. IEC 60529. Dette apparat er beskyttet
mod faste fremmedlegemer med en diameter på
12 mm og større, som f.eks. fingre.
Dette apparat er ikke beskyttet mod vand.



Tekniske data

73

Klinisk test:	Målenøjagtigheden svarer til kravene i ISO 81060-2
maksimal måleafvigelse på manchettrykket:	± 3 mmHg eller 2 % af den aflæste værdi (den største værdi gælder)
maksimal måleafvigelse af pulsvisningen:	± 5 %
gældende standard:	IEC 80601-2-30: "Særlige bestemmelser for sikkerhed inklusive væsentlige effekt-egenskaber for automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere"



74 Anvisning til måleteknisk kontrol

(kun til fagligt uddannet personale)

Den måletekniske kontrol - mindst hvert 2. år - skal udføres af følgende institutioner eller personer:

- Producent
- Den ansvarlige myndighed for måleteknik
- Personer, som opfylder forudsætningerne for "Medizinprodukte-Betreiberverordnung" (den tyske bekendtgørelse om brugere af medicinsk udstyr).

A) Funktionskontrol

En funktionskontrol af apparatet kan kun udføres på mennesker eller med en egnet simulator.

B) Kontrol af tæthed i trykkredsløbet og afvigelse i visning af tryk

Bemærk:

- a) Hvis trykket i målemodus stiger over 320 mmHg, reagerer den hurtige udledningsventil og åbner for trykkredsløbet. Hvis trykket i test-modus stiger over 320 mmHg, blinker måleværdiindikatoren.
- b) Når der udføres tests, skal stikket fjernes fra manchetslangen. Efterfølgende skal den korte tilslutningsstuds på stikket – hidtil forbundet med bøsningen på apparatet – forbindes med manchetslangen og den lange tilslutningsstuds på stikket med apparatet.
Der skal ydermere integreres en pumpebold.

(kun til fagligt uddannet personale)

Kontrol

- 1.) Fjern batterierne.
- 2.) Hold START-knappen nede, og sæt batterierne i.
- 3.) Giv slip på START-knappen.
Apparatet er nu i test-modus; i felterne SYS, DIA og PULS vises det aktuelle tryk.
- 4.) Kontrol for afvigelse i visning af tryk og tæthed i trykkredsløbet (tag højde for tid for anbringelse af manchetten mindst. 30 sek.) udføres på sædvanlig måde.

- 5.) Sluk for apparatet ved at trykke på START-knappen igen og anbring stikene som hidtil.

Sikkerhed

Med henblik på sikkerheden kan husets overdel og underdel forbindes med et sikkerhedsmærke; som et alternativ kan der udføres en beskyttende udboring til husets forbindelsesskrue på apparatets underside.

 Service og vedligeholdelse må ikke udføres, når apparatet er i brug.

