


# V-Monovette® Urin System

## Brugervejledning

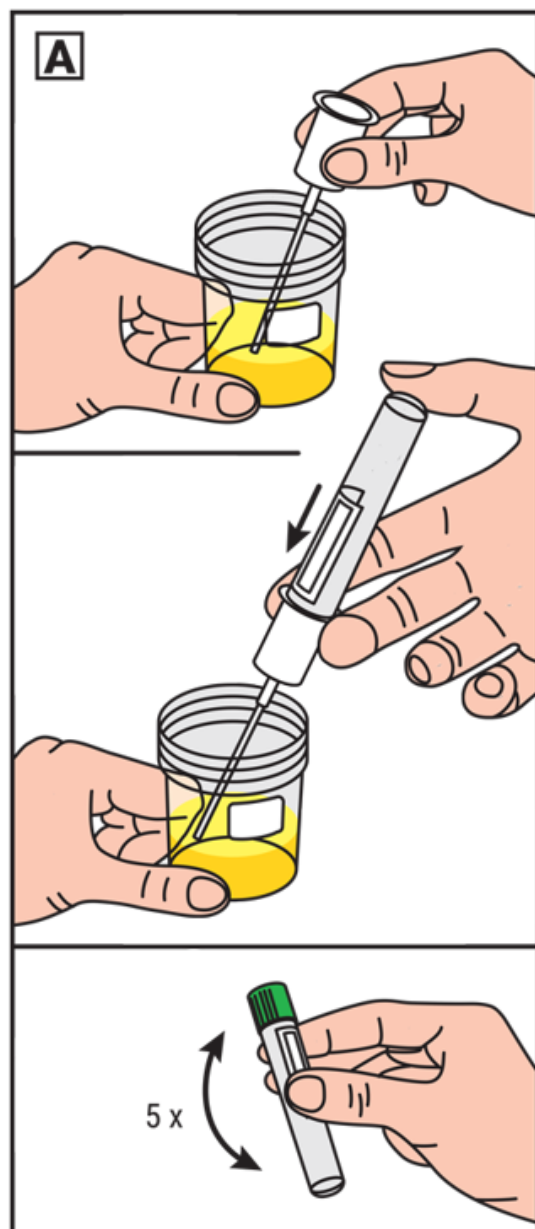

Urin opsamles i egnet beholder.

Sugeenheden placeres i urinprøven med strået nedad.

Urin-Monovetten® (reagensglasset) placeres forsigtigt ned i sugeenheden, der aktiveres ved et let tryk.

**OBS! Når sugeenheden får fat, og der mærkes et sug, skal der ikke trykkes yderligere.**

Pres eller skub aldrig hårdt ned, da låget ellers kan falde af, når delene adskilles.

Vakuum vil nu suge urinprøven over i røret. Røret skal fyldes helt.

**OBS!** Hvis Urin-Monovetten® indeholder en stabilisator (borsyre), skal det vendes 5 gange efter endt fyldning.

Advarsel: Risiko for stikskader. Vær forsigtig med håndtering af sugeenheden. Der er placeret en nål i den brede ende af enheden.

