

BRUGSANVISNING

MBA

PAPIR/FOLIE AUTOKLAVEPOSE M/ SELVKLÆB

Anvendelse: Anbring genstande, der skal steriliseres, i autoklaveposen. Som en generel anbefaling skal produkter, der skal placeres inde i posen, være mindre end $\frac{3}{4}$ af posestørrelsen for at sikre forsvarlig lukning og forhindre brud. Før strimlen trækkes af, skal forseglingszonen foldes let for at markere foldelinjen. Træk strimlen af klæbebåndet, fold siderne sammen og pres med fast tryk, så klæbebåndet er godt forsegle. Tryk sammen fra midten og udad. Forseglingen skal dække både papir og plastik, undgå bobler og huller. Anvend ikke genstandene, hvis pakningen er beskadiget. Hvis der steriliseres flere poser i autoklaven, er det vigtigt, at plastiksiden af poserne vendes imod papirsiden af den tilstødende pose. Brug eventuel et stativ for at undgå at autoklaveposerne ligger i stabler. Kontroller efter sterilisering at poserne er tørre.

Opbevaring: Poserne skal opbevares på et køligt og tørt sted beskyttet mod sollys. God lageromsætning anbefales. Den anbefalede opbevaringstemperatur er mellem 10 ° og 30 ° C og luftfugtighed mellem 30-70%.

Holdbarhed før sterilisation: Under optimale anvendelses- og opbevaringsbetingelser er den forventede holdbarhed 4 år fra fremstillingsdato.

Holdbarhed efter sterilisation: Produkternes sterilitet er testet i henhold til den påregnede anvendelse. Testresultater efter 365 dage er validerede, og prøverne opfylder sterilitetstesten. Denne information er baseret på vores nuværende viden og på resultaterne fra BIOTECNAL, S.A. og EUROFINS BIOLAB, som har udført testen i henhold til ASTM F1929, ASTM D 903-93 og procedurerne i UNE-EN-ISO 11737-2. Genstande, der er steriliserede, forbliver sterile, medmindre posen åbnes, beskadiges eller bliver våd.

Indikatorer: Kemiske indikatorer, som er trykt på poserne, ændrer farve, når steriliseringsprocessen er gennemført. Kemiske indikatorer er udelukkende procesindikatorer, og de kan aldrig verificere sterilitet. Kemiske indikatorer bør bruges sammen med biologiske indikatorer til at verificere, at steriliseringen er afsluttet. Den oprindelige og den endelige farve kan variere med + 30%, afhængigt af udskrivningsteknik og autoklaveringsstype. Selvom farveintensiteten kan variere, vil farveændringer være tilstrækkelige.

Engangsartikel. Kan ikke genanvendes.