

Brugsanvisning HEINE mini NT ladestander

Hounisenvarenummer 0012.0056



Denne brugsanvisning erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet, Og som det anbefales at læse og gemme til senere brug.

Anvendelse

HEINE mini NT er designet udelukkende til at lade HEINE mini 2000 og mini 3000 ladegreb med genopladelige batterier. Dermed garanteres laderens effekt og holdbarhed kun til HEINE mini produkter. HEINE mini-serien bør kun anvendes af kvalificeret medicinsk personale.

Advarsels- og sikkerhedsoplysninger

Under ingen omstændigheder bør ladestanderen åbnes. Reparationer bør kun udføres af professionelle. Brug ikke opladeren hvis der er defekter.

mini NT ladestander skal kun tilsluttes den spænding, der er anført på identifikationslabel. Hvis apparatet ikke er i brug over længere tid, anbefales det at trække stikke ud. Hvis der kommer væske ind i apparatet, skal det testes med det samme. mini NT må ikke anvendes i lokaler med risiko for eksplosion. Ved korrekt anvendelse er den forventede levetid omkring 7 år.

Opsætning

- Vær opmærksom på, hvor apparatet placeres. Mini NT opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet. Funktionen kan dog blive påvirket af elektriske og magnetiske felter fx i forbindelse med radiologiske apparater eller mobiltelefoner.
- Sæt stikket i stikkontakten og apparatet er klar til brug.
- mini NT laderen sikrer, at batterierne holdes i den ideelle ladestand uanset ladegrebets størrelse.
- Når et ladegreb/håndtag sættes i laderen er det vigtigt, at ladegrebet/håndtag er slukket og opladningsrummene er rene.
- Hvis der er to ladegreb/håndtag i holderen, må de ikke røre hinanden.
- Ved hjælp af en adapter kan laderen anvendes til både mini 2000 og mini 3000.
- Når adapteren sættes i, skal der være sluttet for strøm til laderen.
- Ideelt opbevares ladegrebene i laderen, når de ikke er i brug, de kan ikke blive overopladet.
- Ved et par sekunder fra et greb/håndtag er taget ud til det næste sættes i.
- Genopladelige batterier kan kun lades, når de er i et ladegreb/håndtag
- Genopladelige batterier kan kun lades, hvis den korrekte mini NT-bund af metal er sat i ladegrebet/håndtaget. Standardbunden er plastik og anvendes når mini apparatet kører på alm. AA batterier.
- Når lyset blinker er opladningen i gang.
- Når lyset er konstant, er opladningen fuldført og ladegrebet/håndtaget er klar til brug ved maksimal power.
- Når opladningen er fuldført går ladestanderen på sparemode, hvilket er indikeret med svag lys ring.
- Hvis der ikke er lys i opladeren, er det fordi den er tom eller defekt.

Hygiejne, ydersiden af opladeren

- Desinfektionsserviet, godkendt til anvendelse op plastik.
- Opvredet klud med vand, evt. pH neutralt rengøringsmiddel.
- Isopropyl alkohol kan anvendes i en koncentration op til 70 %.
- Brug IKKE spray eller nedsænkning i bad, dette vil forårsage skade på laderen.
- Brug ikke opvaskemaskine, høje temperaturer eller sterilisation, dette vil ødelægge laderen.

Tekniske specifikationer

Hovedforsyning:	100 -240 v / 50 -60 Hz
Forbrug:	160 -80 mA
Sikring:	Integreret overbelastningsbeskyttelse
Ladestrøm:	Optimal ladecyklus CC/CV til mini 2Z NiMH
Ladetid:	NiMH 2,5 v = ca. 4 timer (680 mAh)
Sikkerhedsklasse:	II
Beskyttelsesklasse:	IP 20
Dimensioner:	112 x 50 x 52 mm
Vægt:	270 g
Omgivelserne temperatur:	+ 10 °C - + 35 °C
Omgivelsernes fugtighed:	10 % - 75 %
Omgivelsernes lufttryk:	700 hPa – 1060 hPa