

Brugsanvisning – Sterilisationsposer

Produktbeskrivelse

Westfield Medicals steriliseringsposer er lavet af et enkelt papirlag, konstrueret til at danne en åben pose med en forseglede bagsidesøm og en foldet og forseglede bund.

Produktets tilsigtede anvendelse er at opretholde steriliteten af terminalt steriliseret medicinsk udstyr indtil anvendelsestidspunktet.

Sterilisationsposer fås i to lukkekonfigurationer: "varmeforseglede" poser, som har et klæbebånd øverst på posen til varmeforsegling; og "almindelige" poser, som er beregnet til at lukkes med autoklavetape. Begge posekonfigurationer har en kant øverst for at lette åbningen.



Begge posekonfigurationer er kompatible med damp-, ethylenoxid- og formaldehydsteriliseringsprocesser.

Opfyldning

Omkring 1/3 af pakken skal være tom plads.

Placér instrumentet i posen med håndtagets ende ved den åbningsende.

Fjern så meget luft som muligt fra posen, inden den forsegles.


Dobbeltpakning

Dobbeltpakning kan anvendes, hvor det kræves af lokal praksis. Vælg passende størrelser på den indre og ydre pose for at undgå, at den indre pose folder.

Lukning

Det foretrukne forseglingsudstyr til varmeforseglede poser er en automatisk roterende varmeforsegler med en forseglingshastighed på 6-10 m/min. Den anbefalede temperaturindstilling er 175-200 °C (347-392 °F).

Posens "almindelige lukning"-konfiguration kræver foldning og fastgørelse med indikator tape, hvilket er kompatibelt med den valgte steriliseringsmetode.

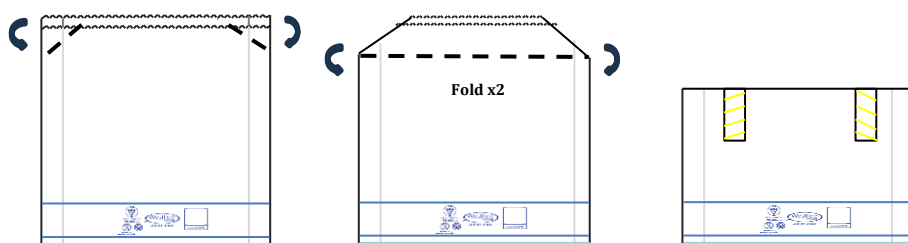

Tag hjørnerne af den åbne ende af poserne og lav en diagonal fold indad, som er cirka 5 mm - 10 mm dyb. Lav derefter tre folder af samme dybde på tværs af hele posens bredde. Til sidst fastgøres folden med indikator tape, og sørg for, at tapen sidder sikkert fast uden knæk/folder.

Påfyldning af sterilisator

Poser bør placeres oprejst, hvor det er muligt, eller de kan placeres fladt. Sørg for, at kammeret ikke er overbelastet, og behandl lasten i henhold til etablerede procedurer.

Inspektion efter sterilisering

Kontrollér at pakken er intakt.

Kontrollér at pakken er ren og tør.

Dampindikator skifter fra PINK til BRUN, når den behandles.



Opbevaring og transport

Opbevar på et rent og tørt sted.

Anbefalede opbevaringsforhold er 10-35 °C (50-95 °F), 20-80 % relativ luftfugtighed.

Beskyt mod sollys og UV-lys.

Produktet opbevares bedst i originalemballagen (PE-folie og lukket karton)

Brug ikke produktet efter den angivne udløbsdato.

Åbning

"Varmeforseglings"-poserne skal åbnes ved at skære opad på tværs af hvert hjørne til midten, under varmforsglingsbåndet. Posen kan derefter åbnes aseptisk.

For poser med "almindelig lukning" skal du rive indikatortapen op og folde posen ud for at åbne.



Affaldshåndtering

Alle produkter er kun beregnet til engangsbrug.

Hvis materialerne adskilles og sorteres, kan de genbruges af specialiserede genbrugsanlæg.

Bortskaffelse ved forbrænding eller deponering er mulig.

Ethvert produkt, der er kommet ind i operationsstuen, skal behandles som potentielt biologisk farligt affald og bortskaffes i henhold til lokale anbefalede praksisser.

Westfield Medical

TC-D017 Rev 1 Maj 2025