

## Brugsanvisning – Selvlukkende steriliseringsposer

### Produktbeskrivelse

Westfield Medical steriliseringsposer er fremstillet af flerlags PET/PP-film, papir af medicinsk kvalitet og selvklæbende tape.

Produktets tilsigtede anvendelse er at opretholde steriliteten af terminalt steriliseret medicinsk udstyr indtil anvendelsestidspunktet. Disse poser er særligt velegnede til brug i små praktiserende lægepraksisser, tandlægeklinikker og andre sundhedsmiljøer, hvor brugerne ønsker at undgå omkostningerne ved indkøb og validering af varmeforseglingsudstyr.

Velegnet til sterilisering med DAMP, ethylenoxid (EO) og formaldehyd (FORM).

Procesindikatorer for DAMP og EO er trykt på posen.



### Opfyldning

Efterlad 2 cm mellemrum mellem instrumentet og den forseglede kant af posen for at sikre jævn luftstrøm. Omkring 1/3 af pakken skal være tom plads.

Placér enheden i posen med håndtaget i den vinkelformede ende.

Fjern så meget luft som muligt fra posen, inden den forsegles.



### Dobbelt pose

Vælg passende størrelser på den indre og ydre pose for at undgå at den indre pose foldes. Dette kan hæmme indtrængen og udtrækningen af steriliserende gasser og kompromittere steriliseringsprocessen.

Pak poserne film mod film for at sikre, at papirsiderne er sammen.

Fjern overskydende luft fra posen inden forsegling.



### Etikettering og markering

Etiketter og markeringer bør placeres på filmsiden af posen for at undgå at blokere gasstrømmen ind i posen.

### Forsegling

Posen kan forsegles med den integrerede klæbestripe.

Fjern bagpapiret fra klæbestrimlen i den åbne ende af posen.

Fold strimlen langs den præformede foldelinje for at danne en fuldstændig forsegling, der dækker filmen og papiroverfladerne.

Tryk forsigtigt strimlen fra midten og ud mod kanterne for at fastgøre forseglingen.



### Påfyldning af sterilisator

Når du lægger poserne i sterilisatoren, skal du placere dem i kurven, så filmen vender mod filmen, og papiret vender mod papir. Enkeltposer skal placeres med filmen øverst.

Behandl lasten i henhold til etablerede procedurer.



### Inspektion efter sterilisering

Kontrollér at pakken er intakt.

Kontrollér at pakken er ren og tør.

Dampindikatoren skifter fra PINK til BRUN, når den behandles.

EO-indikatoren skifter fra BLÅ til GRØN, når den behandles

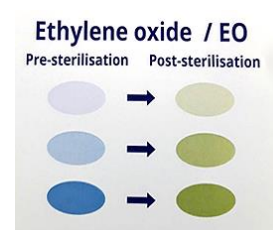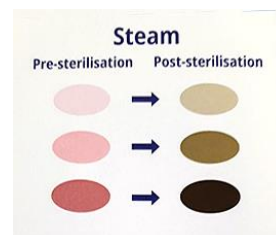

### Opbevaring og transport

Opbevar på et rent og tørt sted.

Anbefalede opbevaringsforhold er 10-35 °C (50-95 °F), 20-80 % relativ luftfugtighed.

Beskyt mod sollys og UV-lys.

Produktet opbevares bedst i originalemballagen (PE-folie og lukket karton)

Brug ikke produktet efter den angivne udløbsdato.

### Åbning

Åbn altid posen i den angivne retning, startende ved vinkellinjen.

For en ren åbning, åbn posen langsomt og jævnt.

Åbn så langt som nødvendigt for at enheden kan fjernes (normalt omkring 1/3 af længden)



### Affaldshåndtering

Alle produkter er kun beregnet til engangsbrug.

Hvis materialerne adskilles og sorteres, kan de genbruges af specialiserede genbrugsanlæg.

Bortskaffelse ved forbrænding eller deponering er mulig.

Ethvert produkt, der er kommet ind i operationsstuen, skal behandles som potentielt biologisk farligt affald og bortskaffes i henhold til lokale anbefalede praksisser.

Westfield Medical

TC-D009 Rev 1 Januar 2021