

Brugsanvisning – Steriliseringsruller (papir)

Produktbeskrivelse

Westfield Medical steriliseringsruller er fremstillet af flerlags PET/PP-film og papir af medicinsk kvalitet.

Produktets tilsigtede anvendelse er at opretholde steriliteten af terminalt steriliseret medicinsk udstyr indtil anvendelsestidspunktet.

Velegnet til sterilisering med DAMP, ethylenoxid (EO) og formaldehyd (FORM)

Procesindikatorer for DAMP og EO er trykt på posen.

Ruller skal skæres til den ønskede længde og forsegles i den ene ende for at danne en pose.



Opfyldning

Efterlad 2 cm mellemrum mellem instrumentet og den forseglede kant af rullen for at sikre jævn luftstrøm. Omkring 1/3 af pakken skal være tom plads.

Placér enheden i spolen med enhedens håndtag på åbningssiden.

Fjern så meget luft som muligt fra pakken, inden den forsegles.

Dobbeltpakning

Vælg passende indvendige og udvendige rullestørrelser for at undgå at den indvendige komponent folder. Dette kan hæmme indtrængen og udtrækningen af steriliserende gasser og kompromittere steriliseringsprocessen.

Pak de formede ruller film mod film for at sikre, at papirsiderne er sammen.

Fjern overskydende luft fra pakken inden forsegling.

Hvis du pakker en pose på en rulle, eller omvendt, bør du vælge passende og kompatible størrelser.

Etikettering og markering

Etiketter og markninger bør placeres på foliesiden af pakken for at undgå at blokere gasstrømmen ind i pakken.



Forsegling

Rullerne kan forsegles ved at danne en forbindelse mellem de to sider (papir og film).

Det foretrukne forseglingsudstyr er en automatisk roterende varmeforsegler med en forseglingshastighed på 6-10 m/min. Den anbefalede temperaturindstilling er 175-200 °C (347-392 °F).

Rulleproducenten er ansvarlig for valideringen af de præformede tætninger.

Brugeren er ansvarlig for valideringen af tætningerne til endelukning, der er lavet i den sterile procesenhed. Der findes produkter til kontrol af forsegling for at lette dette.

Påfyldning af sterilisator

Når du lægger pakkerne i sterilisatoren, skal du placere dem i kurven, så filmen vender mod filmen, og papiret vender mod papir. Enkeltpakker skal placeres med filmen øverst. Behandl lasten i henhold til etablerede procedurer.


Inspektion efter sterilisering

Kontrollér at pakken er intakt.

Kontrollér at pakken er ren og tør.

Dampindikatoren skifter fra PINK til BRUN, når den behandles.

EO-indikatoren skifter fra BLÅ til GRØN, når den behandles.

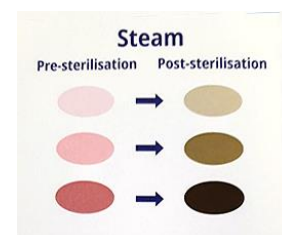

Opbevaring og transport


Opbevar på et rent og tørt sted.

Anbefalede opbevaringsforhold er 10-35 °C (50-95 °F), 20-80 % relativ luftfugtighed.

Beskyt mod sollys og UV-lys.

Produktet opbevares bedst i originalemballagen (PE-folie og lukket karton)

Brug ikke produktet efter den angivne udløbsdato.

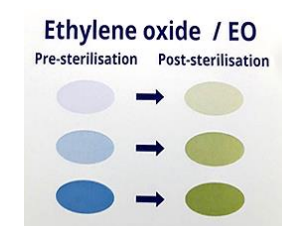

Åbning

Åbn altid pakken i den angivne retning.

For en ren åbning, åbn pakken langsomt og jævnt.

Åbn så langt som nødvendigt for at enheden kan fjernes (normalt omkring 1/3 af længden)

Affaldshåndtering

Alle produkter er kun beregnet til engangsbrug.

Hvis materialerne adskilles og sorteres, kan de genbruges af specialiserede genbrugsanlæg.

Bortskaffelse ved forbrænding eller deponering er mulig.

Ethvert produkt, der er kommet ind i operationsstuen, skal behandles som potentielt biologisk farligt affald og bortskaffes i henhold til lokale anbefalede praksisser.



Westfield Medical

TC-D007 Rev 1 Januar 2021