

mulimed-otoscillo professional

Øreskylningsapparat
Varenummer 0012.1001



ANVENDELSE

Øreskylningsapparatet anvendes til hygiejnisk rensning og skylning af øregangen. Apparatet skaber en pulserende kontrolleret og effektivt vandstråle og vandet tempereres til behagelig temperatur. Apparatet må kun håndteres af sundhedsfagligt personale.

Anvendes sammen med mulimed-otoscillo engangsdyser. Ekstra engangsdyser kan bestilles på varenummer 0012.1002.

KORT BRUGSANVISNING

OBS: Denne quick guide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

FORBEREDELSE

1. Patienten skal sidde på en fast stol, gerne med armlæn.
2. Brug afdækning og opsamlingsbakke.
3. Anvend 38° C varmt postevand, temperaturen styres med det medfølgende testkort, der holdes under vandhanens vandstråle. Når temperaturen er 38° C påfyldes apparatets blå vandbeholder. Testkortet hænges i beholderen, så der konstant kan holdes øje med temperaturen.
4. Sprøjtehovedet sættes på håndtaget, herpå sættes en engangsdyse og sprøjtetallerkenen monteres. Smør evt. med vaseline, hvis der er modstand.
5. Håndtaget med dysen holdes lavt, så slangen fyldes med vand.
6. Tilslut strøm.
7. Drej indstillingen til niveau 6 og skyl i ca. 10 sekunder for at rense apparatet.

ØRESKYLNING

8. Sæt indstillingen på 2 og start skylning af patientens øregang. Når patienten har vænnet sig til vandstrålen, kan der langsomt skrues op i niveau. Husk ALDRIG over niveau 4.
9. Sæt håndtaget tilbage i holderen. Tilbageløbsventil forhindrer kontamineret vand i at løbe tilbage i slangen.
10. Tjek patienten og gentag evt. pkt. 6.

RENGØRING

11. Tøm vandbeholderen, så der kun er 2 cm tilbage i bunden. Tilsæt ca. lige meget klar husholdningseddike til vandet i beholderen.
12. Skyl på niveau 2, til beholderen er næsten tom.
13. Tag beholderen af og tøm.
14. Sprøjtetallerken og dyse tages af og vaskes separat.
15. Håndgreb og slange sænkes under apparatniveau, så vandet løber ud af slangen.
16. Tag strømmen fra apparatet.

GODE RÅD

- **VIGTIGT!** Strålen må aldrig rettes direkte mod trommehinden.
- Der er 6 niveauer, men kun 1-4 må anvendes til øreskylningen, niveau 5 + 6 er til rensning af apparatet.
- Der må kun anvendes almindeligt postevand, ikke destilleret vand.
- Apparatet har af sikkerhedsårsager ingen afbryder, så stikket bør tages ud straks efter brug.
- Rengøres på ydersiden med aldehydfrit desinfektionsmiddel.
- Bliver vandbeholderen svær at få af apparatet, kan man gnide den sorte ventil/pakning med lidt vaseline.
- Er der stor modstand når engangsdysen eller sprøjtehovedet skal monteres eller afmonteres kan ligeledes bruges lidt vaseline.

SKIFT ENGANGSDYSE

Afmontering: Træk låseringen tilbage, med to fingre og tommelfingeren på den sorte del af sprøjtehovedet. Træk stænkskærmen af og træk engangsdysen ud.

Montering: Hold på den sorte del, skub låsen frem og tryk dysen i til et lille klik. Skub stænkskærmen helt på igen.

OBS: Ved modstand kan delene smøres med vaseline.

TEKNISKE DATA

Slangelængde:	100 cm
Power:	Tilkobles 220 V
Power:	50/60 Hz
Sikkerhedskrav:	Opfylder krav under CE 0124



Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com | www.hounisen.com

feb.24 / Version: 1.2