

Supa Mega Slim Cassette

EAN-0102-02A, EAN-0104-02A, EAN-0106-02A, EAN-0107-02A, EAN-0108-02A, EAN-0109-02A, EAN-0110-02A

En lille enhed beregnet til at blive brugt i laboratoriet til at understøtte/indeholde kliniske vævsprøver (f.eks. biopsiprøver) for at lette behandlingen af prøver [f.eks. fiksering (indkapsling i paraffinvoks), dehydrering, infiltration] som forberedelse til efterfølgende cytologisk eller histologisk undersøgelse og opbevaring. Den er en beholder i syntetisk polymer med eller uden låg med dræningshuller for at maksimere væskeeksponering under vævssækning i en større enhed, som beholderen placeres. Enheden er til engangsbrug.

Til laboratoriebrug.

Opbevar på et tørt sted. Opbevar ikke i direkte sollys.

Dette produkt udløber ikke under normale miljøforhold.

Mærkningsfunktioner: CellMark pens, 2B pencils.

Behandlingsbegrænsninger: Velegnet til behandling ved høj temperatur. Velegnet til mikrobølgebehandling.

Brugsanvisning

1. Anbring væv i Supa Mega Slim-kassetten. Vi anbefaler, at kun en prøve på 5 mm bruttotykkelse placeres i kassetten.

2. Når sekvensen er færdig, skal du lukke låget og placere kassetten i et fikseringsmiddel, hvor det sikres at den er helt nedsænket.

3. Behandl kassetten ved hjælp af opløsningsmidler i henhold til din sædvanlige protokol, indtil prøverne er klar til indlejring. Hvis du bruger usædvanlige reagenser, foreslår vi, at du udfører indledende kemiske kompatibilitetstests, inden du bruger Supa Mega Slim Cassette til at placere vævsprøver i.

4. Åbn kassetten forsigtigt.

5. Indlejr ved hjælp af Supa Mega Slim-baseform.

6. Fjern blokken fra formen, når den er fuldt afkølet, og fjern overskydende voks.

7. Supa Mega Slim Spacer Block [JFA-0100-00A] er påkrævet for at sikre, at kassetten er tilstrækkeligt fastspændt i kassetteklemmen.

BEMÆRK: Brugere af mikrotomerne Leica Biosystems RM 2200, der

bruger Leica Super Cassette Clamp, er nødvendige for at foretage en ændring af bunden af Leica Knife Holder, hvis de bruger Supa Mega Slim-baseformen. Hvis denne ændring ikke foretages, kan der kun skæres blokke, der er støbt med en standard Supa Mega-basisform.

BEMÆRK: Brugere af roterende Eprexia-mikrotomer ved brug af Microm Super Mega Cassette Clamp anbefales at bruge Supa Mega Slim Chuck Supports [JFA-0200-63A] for at sikre, at kassetten er tilstrækkeligt fastspændt.

8. Bortskaf låget i overensstemmelse med laboratorieretningslinjerne.

GENBRUG IKKE DETTE PRODUKT.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.