

CBC-VECOS®



Bestillingsinformation

Varenummer


Varenavn

1923.0932


Stasebånd, engangs, str. S, CBC VECOS®
Fleece PP, bredde 30 mm, længde 50 cm
125 stk/æske

1923.0932


Stasebånd, engangs, str. L, CBC VECOS®
Fleece PP, bredde 35 mm, længde 65 cm
100 stk/æske

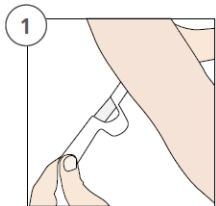


Placer den hvide farve mod patientens arm

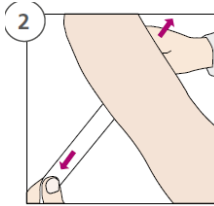

Opbyg kompression ved at trække elastikken i stasebåndet helt ud

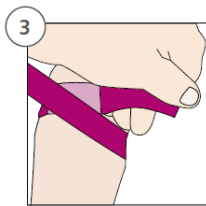

Læg stasebåndet tæt om armen og lad det krydse hen over velcroen

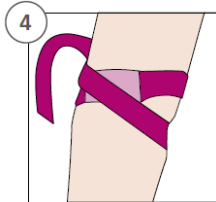

Træk i stasebåndet for at fjerne det

OBS: Engangsstasebånd kun bør benyttes en gang for at undgå krydskontamination



LATEX-FREE

DEHP-FREE

SILICONE-FREE



CE

CBC-VECOS®

Det skånsomme engangsstasebånd



Hygiejnisk Skånsomt Sikkert

CBC-VECOS®

Det skånsomme engangsstasebånd



Fordele

Engangsstasebånd

- Ingen arbejdskrævende rengøring eller desinfektion
- Ingen krydskontamination med MRSA eller lign

Elastik sikrer optimal kompression (ca 20 mm Hg)

- Et simpelt træk sikrer at minimum kompression opnås

Fløjlsbløde materiale sikrer optimal komfort for patienten

- Ingen blå mærker og efterlader ingen mærker på huden
- Let at håndtere selv iført handsker
- Velegnet til brug i våde og/eller meget tørre områder

Mikro velcro sikrer let af- og på-montering

- Velcro hæfter på hele båndet

Omkostningseffektiv

- Kan også anvendes som kompres efter venepunktur
- Ingen udgifter til rengøring og desinfektion

Passer til alle patienters arme (fra Ø 4 cm), findes i 2 forskellige størrelser

- 30 mm bred, 50 cm lang
- 35 mm bred og 65 cm lang

Latex-, silikone og ftalat-fri

Kan bruges indenfor:

- Pædiatri, onkologi
- Isolationsstuer
- Rehabiliteringscentre
- Blodbanker
- Hjemmebesøg
- Plejehjem
- Skadestuer
- Epidemiske områder

