

CLINITEK Status® urinalysesystem fra SIEMENS til pålidelig maskinel aflæsning af teststix til urinprøver og anvendes sammen med SIEMENS Multistix® urinstix.

Anvendes til indikation af sygdom i urinveje, nyrer, diabetes eller graviditet.

Stix fås med 5 eller 8 parametre:

Leukocytter, nitrit, hæmoglobin, protein, glukose, ketonstoffer, pH og densitet.

## Brugsanvisning

Tænd for Clinitek Status + på fronten.

Derefter udfører Clinitek Status + automatisk en funktionstest og slæden føres i startposition.

## Når Clinitek er tændt (er normalt tændt og klar til analyse)

1. Vælg STRIP TEST på skærmen.
2. Scan Operatør ID
3. Vælg ENTER NEW PATIENT
4. Brug barkodescanneren til indlæsning af patientid. PMB-nr. bruges når analysen er rekvireret i BCC ellers CPR-nr. (kan også tages ind).
5. Tag en urinstix op af opbevaringsglasset, skru låget på igen og vælg START på apparatet.

### Indenfor 8 sekunder skal følgende udføres:

6. Dyp urinstixen hurtigt i den velblandede urin, og hold den mod uringlasset, når den tages op, så det meste væske drypper af.
7. Siden af stixen holdes mod et stykke cellestof eller lignende.
8. Placér stixen på slæden. Apparatet aflæser stixen, resultaterne vises på skærmen og kan eventuelt udskrives.
9. Vælg DONE for at komme tilbage til START.
10. Stixen kasseres, slæden aftørres med grøn Alkoholwap 82% ethanol.
11. Læs Operator's Manual for mere udførlig vejledning.