

CoaguChek® XS PT Test teststrimler



Anvendelse	Dette produkt sælges af Hounisen udelukkende til professionelle brugere i den danske sundhedssektor, herunder lægepraksis. Produktet anvendes til måling af INR-værdier.
Træning og brug	Ønsker du en gennemgang af produktet samt produkttræning, kontakt venligst vores kundeservice på tlf. 86 21 08 00. Det vil være muligt at booke træning i egen klinik med vores sygeplejerske.
Ref.nr. på emballagen	046255358 / 24 stk. 04625315 / 2 x 24 stk.
Varenummer Hounisen	0010.2011 / 24 stk. 0010.2012 / 2 x 24 stk.
System	CoaguChek® XS Plus og CoaguChek® XS Pro
Min. bestilling	24 stk.
Opbevaring/holdbarhed	Opbevares ved 2-30 °C. Overhold den på produktet angivne udløbsdato ved opbevaring. Brug ikke teststrimler, der er ældre end forfaldsdatoen. Teststrimler udtaget af prøvedåsen, skal anvendes indenfor 10 minutter. Luk pakningsrøret omgående, når der er udtaget en teststrimmel. Dette er vigtigt, så øvrige teststrimler ikke ødelægges af luftfugtighed.
Leveret materiale	24 teststrimler i tæt rør + 1 kode-chip
Forberedelse	Kode-chip og teststrimler hører sammen. Tjek, at numrene er de samme. Ombyt evt. chippen i maskinen. Hver gang en ny teststrimmel indsættes, skal man ved at trykke 'M' bekræfte, at nummeret på chip og æske er ens. Sørg for, at apparatet ligger på et vandret underlag eller ligger vandret i hånden. Vask omhyggeligt hænderne, klargør blodlancette og udtag teststrimmel fra prøverøret. Bortskaf blodlancette og brugte teststrimler i henhold til gældende regler.
Prøvemængde	Brug udelukkende frisk kapillarblod eller venøs fuldblod uden antikoagulans. Kapillarblod bruges indenfor 15 sekunder, veneblod indenfor 30 sekunder. Den anvendte bloddråbe skal minimum være på 8 µl blod. Brugen af mindre blod fører til en fejlmelding. Brug den første bloddråbe på teststrimlen. Sørg for, den er stor. Lav aldrig endnu en bloddråbe for at få mere blod. Gennemfør ikke en ny måling med blod taget fra samme stik/hul.
 OBS	Systemet er ikke egnet til prøver fra patienter behandlet med protaminsulfat. Brugen af forkert chip kan give forkerte resultater.