

WiduMed® Strep A-test Testkassette

Varenummer 0010.0203

Anvendelse

Hurtig test til visning af gruppe A streptokok-antigen

Opbevaring

Kan opbevares ved stuetemperatur på +2-30 °C.

Vær opmærksom på

- Kun til in vitro-diagnostisk brug
- Kun til professionelle brugere
- Bland ikke reagenser fra forskellige æsker/lotnumre
- Reagens 1 er giftig ved indtagelse. Nummer står på flasken
- Brug ikke test efter udløbsdato (fremgår på hvert enkelt produkt)
- Brug egnede handsker og kittel

Kvalitetskontrol

Iht. God LaboratoriePraksis (GLP) anbefales kontrol af lotnummer (at produktet virker, som det skal).

Test/positiv kvalitetskontrol gennemføres på følgende måde:

- 1) Fyld reaktionsrøret med:
 - a) 4 dråber reagens 1
 - b) 4 dråber reagens 2
- 2) Ryst flasken med positiv kontrol, og tilsæt 1 dråbe.
- 3) Bland væsken godt, og dryp 3 dråber i testkassetten.
- 4) Positivt resultat kan aflæses indenfor 5 minutter.
Hvis der ikke fremkommer et positivt resultat, bør alle tests kasseres.


Gennemførelse af test

Alle prøver og reagenser skal have stuetemperatur, før testen udføres. Se også tegning i låget på æsken.




- 1) Tilsæt 4 dråber reagens 1
- 2) Tilsæt 4 dråber reagens 2
- 3) Det anbefales at udføre analysen på vatpinden så hurtigt som muligt efter prøvetagning. Sæt omgående vatpinden ned i væsken, og tryk mod siden af røret for frigivelse af væske. Lad vatpinden suge, og tryk væsken ud et par gange, samtidig med at der røres.

Lad herefter vatpinden stå i væsken i min. 1 minut, men ikke længere end 15 min. Herefter trykkes vatpinden grundigt af mod siden og fjernes.

- 4) Sæt dryptud på røret. Dryp 3 dråber væske ned i det runde hul i kassetten.
- 5) Aflæs resultat efter 5 min. i aflæsningsvinduet, dog maksimalt efter 10 min.

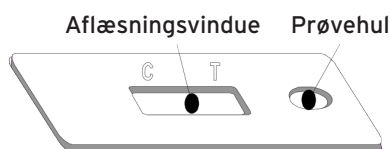

Aflæs resultat

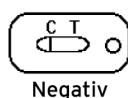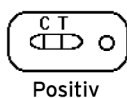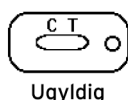

Se tegning i låget af æsken.

Positiv: En rød linje ud for C og T. En svag rød linje ud for T er også positiv.

Negativ: Kun en rød linje ud for C.

Ugyldig: Ingen røde linjer eller linje ud for T.

Er man i tvivl, bør der gennemføres en ny test.

Alle prøveresultater bør tages med forbehold. Se endvidere indlægssedlen fra producenten. Har du spørgsmål eller ønsker demonstration: Kontakt kundeservice på tlf. 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com