

# WiduMed® hCG-test Stix/teststrimler

Varenummer 0010.0231

## Anvendelse

Til hurtig test af graviditetshormon hCG i urin.  
Produktet er kun beregnet til urin.

Produktet har en følsomhed på 20 mIU/ml og kan bruges fra første dag, menstruationen udebliver.

Der er i starten en lav mængde hCG, hvorfor morgenurin bør foretrækkes.

## Opbevaring

Kan opbevares ved stuetemperatur på +2-30 °C.

## Vær opmærksom på

- Kun til in vitro-diagnostisk brug
- Kun til professionelle brugere
- Brug ikke test efter udløbsdato (fremgår på hvert enkelt produkt)
- Brug egnede handsker

## Inden prøven udføres

Du har brug for følgende:


1. Rent bæger til urin
2. Stopur

Urin opsamles i det rene bæger. Der kan bruges urin fra hele døgnet. Dog har morgenurin den største hCG-koncentration, og bør foretrækkes i starten, hvor menstruationen udebliver.

Prøven bør gennemføres, straks efter urinprøven er taget. Prøver kan dog bruges i op til 72 timer, hvis de står koldt (+2-8 °C). De skal opvarmes til stuetemperatur før brug.

Prøver med en synlig forplumring bør før brug centrifugeres, filtreres eller stå, indtil partiklerne har bundfældet sig. Kun klar urin bør benyttes til testen.

## Gennemførelse af test

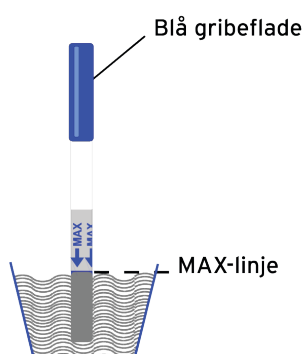

1. Hav bægeret med urin stående foran dig på bordet.
2. Åben hylstret, og tag en stix/teststrimmel ud.  
Hold på stykket med den blå gribeblade.
3. Dyp teststriben til MAX-linjen i 10-20 sekunder.  
MAX-linjen må ikke overskrides.  
Læg herefter teststriben på et flat underlag, der ikke suger fugt.
4. Afvent resultat. Et positivt resultat vil kunne ses efter 40 sekunder.  
For bekræftelse af negativt resultat, bør der ventes minimum 5 minutter, dog ikke længere end 10 minutter.

## Aflæsning af testresultat

### Negativ



### Positiv



**Negativ:** En negativ test (ikke gravid) viser én streg (øverst mod den blå gribeflade).

**Positiv:** En positiv test (gravid) viser to streger.

**Ugyldig:** En ugyldig test viser ingen streger.

## Anmærkninger

Ved et positivt resultat kan den øverste streg godt være en andelse mat, specielt hvis den nederste linje er meget kraftig. Resultatet er dog stadig gyldigt.

Ved negativt resultat anbefales det at gentage testen efter 48 timer, hvis der opstår usikkerhed eller andre forhold tyder på graviditet. Det samme anbefales, hvis der kun er et svagt positivt resultat.

Alle prøveresultater bør tages med forbehold. Se endvidere indlægssedlen fra producenten. Har du spørgsmål eller ønsker demonstration: Kontakt kundeservice på tlf. 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com