

Sekusept® aktiv

1 produkt
2 procedurer



-fordi det er enkelt!



Sekusept® aktiv er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel til medicinsk udstyr. Effektivt og bredt virkningsområde på mikroorganismer samt maksimal reduktion af sekreter og restprotein, garanterer optimale resultater ved rengøring af skoper og medicinske instrumenter.

Sekusept® aktiv rengør og desinficerer ved kun 30 °C, hvilket gør den særligt egnet til termolabilt udstyr som ikke kan steriliseres.

Godkendt
af SSI

Varenummer	Volumen
1107.0000	1,5 kg
1107.0001	6,0 kg

- ✓ Et middel til både rengøring og desinfektion - To arbejdsgange.
- ✓ En opløsning er holdbar i 24 timer og kan anvendes flere gange i løbet af dagen.
- ✓ Et let anvendeligt produkt med lav dosering. Økonomisk og sikker i anvendelse.
- ✓ PerOxyBalance teknologi (Peredikesyre med neutral eller svagt alkalisk pH-værdi.)

Procedure for anvendelse af Sekusept® aktiv

Tilberedning af opløsning

Lav to opløsninger - en til rengøring og en til desinfektion. Pulveret skal opløses i mindst 15 min under jævnlig omrøring før brug. Opløsningerne skal skiftes en gang dagligt eller ved synlig forurening.

15 min.

Dosering Sekusept pulver	Vand	Koncentration
40 gram / 60 ml	1 liter	4 %
20 gram / 30 ml	1 liter	2 %
10 gram / 15 ml	1 liter	1 %

1

Rengøring

Sænk instrumenterne i opløsningen, så alle overflader inkl. kanaler og hule rum er tildækket. Instrumenterne rengøres manuelt mekanisk.

2

Skylning

Skyl med rent vand. Fortsæt til trin 3 for desinfektion, eller Læg til tørre eller tør med rent fugtfrit klæde.

3

Desinfektion

Sænk instrumenterne i opløsningen til desinfektion, så de er helt tildækkede. Afvent minimum anvist virknings-tid. Anbefales 4% i 15 min.

4

Skylning

Skyl med sterilt eller demineraliseret vand. Læg til tørre eller tør med rent fugtfrit klæde. Pak til sterilisation (kritisk).



Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Tlf. 86 21 08 00

salg@hounisen.com

www.hounisen.com