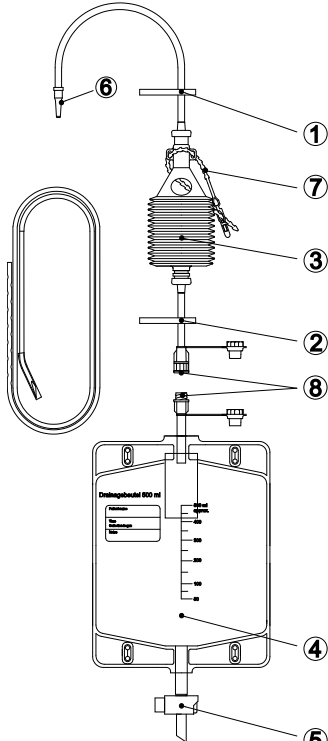


Aktiv-Passivdrainage

inkl. Silikondrain mit Trokar
 Länge 800 mm, 150 mm perforiert

Active-Passive Wounddrainage

incl. silicone drain with Trocar
 Length 800 mm, 150 mm perforated

Zweckbestimmung Pri-Aktiv-Passivdrainagen sind geschlossene Nieder-vakuum-Drainagesysteme, welche einen Initialsog von min. 120 mbar, nach Aktivierung des Faltenbalgs, erzeugen. Sie haben den Zweck, die Wundheilung nach Operationen zu fördern, indem sie Wundsekret ableiten und sammeln. Niedervakuumsystem zur Wunddrainage • mit Sekretbeutel 500 ml • mit Rückschlagventil • Faltenbalg 100 ml Nenninhalt • Initialsog von min. 120 mbar, bei max. komprimiertem Faltenbalg • Silikondrain mit Kontraststreifen und Trokar Nur zum einmaligen Gebrauch. Steril und pyrogenfrei.	Intended Use Pri-active passive drainage systems are closed low-vacuum drainage systems that generate an initial suction of at least 120 mbar after the bellows have been activated. Their purpose is to promote wound healing after operations by draining and collecting wound secretions. Low Vacuum Wounddrainage System • with bag 500 ml • with non-return-valve • aspirator 100 ml • Initial suction of at least 120 mbar, with the bellows compressed to the maximum • x-ray silicone drain and trocar For single use only. Sterile, non pyrogenic.
	Anwendung 1. Schlauchklemme (Pos.1) schließen 2. Faltenbalg (Pos.3) zusammendrücken und Schlauchklemme (Pos.2) schließen 3. Faltenbalg und Beutel konnektieren (Pos.8) 4. Gelegten Drain mit Konnektor (Pos.6) verbinden 5. Schlauchklemmen (Pos.1 und 2) öffnen 6. Drainsystem am Bett aufhängen (Pos.7) Die Aktiv-Passivdrainage mit Sekretbeutel geht automatisch von aktiver zu passiver Drainage (Schwerkraftdrainage) über, wenn die Schlauchklemmen (Pos.1 und 2) geöffnet sind. 7. Das Sekret kann durch die Öffnung des Hahnes (Pos.5) ablaufen 8. Beutel (Pos.4) kann gewechselt werden, zuerst die Klemme (Pos.2) schließen Usage 1. close the clamp (pos.1) 2. compress the bellows (pos.3) and close the clamp (pos.2) 3. connect bellows and drainage bag (pos.8) 4. connect drain (pos.6) 5. open the clamps (pos.1 and 2) 6. Hang the drain system on the bed (pos. 7) The active-passive drainage with secretion bag automatically changes from active to passive drainage (gravity drainage) when the hose clamps (pos. 1 and 2) are open. 7. empty the drainage bag by the opening the cock (pos.5) 8. bag (pos.4) can be changed, first close the clamp (pos.2)
Entsorgung Die Entsorgung darf nur nach den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallstoffe vorgenommen werden. Meldung Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.	disposal Disposal may only be carried out in accordance with the applicable national regulations for waste materials will. report All serious incidents related to the product have to be reported to the manufacturer and the competent authority.

 Hersteller / Manufacturer	 Gebrauchsanweisung Beachten / Consult instructions for use	 Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung / Do not use if package is damaged	 Trocken aufbewahren / Store in a dry place
 Artikelnummer / Catalogue number	 Sterilisiert mit Ethylenoxid / Sterilised using ethylene oxide	 Temperaturbegrenzung / Temperature limits	 Medizinprodukt / medical device
 Chargennummer / Batch code	 Einfach-Sterilbarriersystem mit inliegender Schutzverpackung / Single sterile barrier system with protective packaging inside		 Vor Sonnenlicht schützen / Protect from sunlight
 DEHP-frei / DEHP-free	 Nicht wiederverwenden Wiederverwendung dieses Produktes kann zu einer Veränderung seiner mechanischen oder biologischen Eigenschaften führen. Dies kann Produktversagen, allergische Reaktionen oder bakterielle Infektionen verursachen. do not reuse Reuse of this device may alter its mechanical or biological properties, which may provoke failure of the device, allergic reactions or bacterial infections.		 Verwendbar bis / Use-by date
 Pyrogenfrei / Pyrogen-free	 2		 0482