

# Installation af software fra CD



Der medfølger CD med EDAN-software til almindelig PC

1. Indsæt den medfølgende CD i PC. Guiden er på dansk, ellers kan sproget vælges først i guiden.

2. Kør setup.exe, tillad - JA

3. Installer

4. Klik JA -hvis denne fejl optræder:

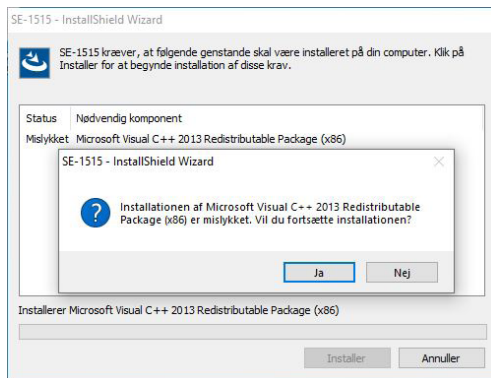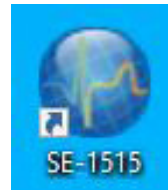


5. Følg vejledning, klik NÆSTE, herefter foreslår den destinationsmappe, hvor på PC'en programmet skal gemmes. Vælg den ønskede placering eller klik NÆSTE.
6. Klik - INSTALLER. Dette tager ca. 2 minutter, hvor det ligner, at der ikke sker noget. Her efter vises destinationsmappen. Klik NÆSTE, vent og gør ikke noget.
7. Genstart PC'en.
8. Efter genstart ligger ikonet SE-1515 på skrivebordet og i den valgte destinationsmappe.
9. OBS: Programmet virker ikke før EKG-apparatet er tilsluttet via USB-stikket. Hvis programmet åbnes uden tilsluttet EKG-apparat vises en boks, der beder om adgangskode. EKG-apparatet kan tilsluttes elektroderne før eller efter det er tilsluttet PC.
10. Virker softwaren ikke, skal du installere en samplingboxdriver, som ligeledes findes på CD'en. De fleste anvender operativsystem til x64, derfor vælges driver til x64. Undersøg evt. hvilket operativsystem din PC anvender.

# Installation af software fra Link

Software til EDAN SE-1515 EKG apparat kan installeres fra følgende link til PC: [Link til SE-1515 software](#)

1. Kopier linkets URL til din browser (fx Google, edge eller Firefox)
2. Kør setup.exe, tillad - JA
3. Installer
4. Klik JA -hvis denne fejl optræder:

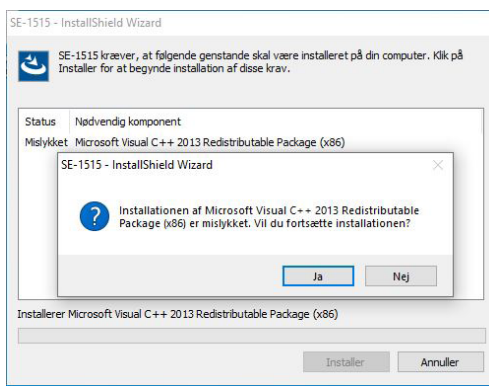

5. Følg vejledning, klik NÆSTE, herefter foreslår den destinationsmappe, hvor på PC'en programmet skal gemmes. Vælg den ønskede placering eller klik NÆSTE.
6. Klik - INSTALLER. Dette tager ca. 2 minutter, hvor det ligner, at der ikke sker noget. Her efter vises destinationsmappen. Klik NÆSTE, vent og gør ikke noget.
7. Genstart PC'en.
8. Efter genstart ligger ikonet SE-1515 på skrivebordet og i den valgte destinationsmappe.
9. OBS: Programmet virker ikke før EKG-apparatet er tilsluttet via USB-stikket. Hvis programmet åbnes uden tilsluttet EKG-apparat vises en boks, der beder om adgangskode. EKG-apparatet kan tilsluttes elektroderne før eller efter det er tilsluttet PC.
10. Virker softwaren ikke, skal du installere en samplingboxdriver, som ligeledes findes på CD'en. De fleste anvender operativsystem til x64, derfor vælges driver til x64. Undersøg evt. hvilket operativsystem din PC anvender.

