

Brugsanvisning KaWe otoskoper, CombiLight, EuroLight og PiccoLight

Hounisenvarenumre 0012.0010, 0012.0012, 0012.0013, 0012.0014, 0012.0015, 0012.0016, 0012.0017, 0012.0020, 0012.0021



Denne brugsanvisning erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet, Det anbefales at læse originalen og gemme den til senere brug.

Anvendelse

Otoskoperne er designet til undersøgelse af den ydre ørekanal samt trommehinden. Otoskopet anvendes sammen med en otoskoptragt. Kun fagligt medicinsk personale må anvende otoskopet. Der tages ikke ansvar for anden anvendelse. Otoskoperne kan anvendes på voksne, børn og spædbørn med en passende størrelse otoskoptragt.

KaWe optoskoper

Der er tre overordnede modeller CombiLight (metal håndtag og plastik hoved), EuroLight (metal håndtag og hoved) og PiccoLight (plastik håndtag og hoved). Brugsanvisningen tager højde for forskelle mellem modellerne, men ikke varianter lysform eller strømkilde.



Advarsels- og sikkerhedsoplysninger

- Brug ikke otoskopet, hvis det er skadet.
- Brug ikke otoskopet uden otoskoptragt, vælg en størrelse, der passer den enkelte patient.
- Engangs-otoskoptragte, må kun anvendes én gang.
- Genanvendelige otoskoptragte skal steriliseres mellem patienter.
- Brug ikke otoskopet på skadet væv.
- Lys ikke i øjne
- Vær opmærksom på patientens øres udformning og brug ikke otoskopet, hvis det kan forårsage skader.
- Hold otoskopet uden for stærke magnetfelter (MRI)
- Mobil højfrekvens kan forstyrre otoskopets funktion.
- Brug kun originale KaWe komponenter.
- Lad ikke otoskopet blive vådt.

EuroLight og CombiLight

- Bunden skrues af.
- Indsæt batterier, almindelige eller genopladelige, tjek at batterierne vender rigtigt (+ mod hovedet) og at spændingen, passer til 2,5 v eller 3,5 v otoskophovedet.
- Hovedet skrues af og på, ved at trykke hovedet lidt ned mod håndtaget og skruer på skruen, en gang i mellem er det godt at tjekke at rillerne er rene, og skruen virker.
- Lampen tændes ved at trykke på den lille låseknop og derefter dreje lysregulatoren til venstre, hermed øges lysintensiteten gradvist.

PiccoLight

- Skift af batterier. Otoskophovedet skrues af. Indsæt batterier, almindelige eller genopladelige, tjek at batterierne vender rigtigt (+ mod hovedet) og at spændingen, passer til 2,5 v eller 3,5 v otoskophovedet.
- Otoskopet tændes på on/off-knappen på lommeklipsen.

Før brug

Tjek otoskopet for skader, tjek at lampen sidder fast og godt sikret. Tjek batteriet ladestand. HUSK øretragt.

Skift af pære med F.O. lys

- Tag hovedet af otoskopet ved at trykke ned.
- Træk pæren ud af bunden af hovedet.
- Sørg for, at den nye pære er KaWe.
- Sørg for, at pæren er ren og uden fingeraftryk.
- Tryk lampen tilbage i hovedet.

Skift af pære PiccoLight C

- Sving forstørrelsesglasset til side og tag pæren ud.
- Skru otoskophovedet af
- Ren pære fri for fingeraftryk skrues i adapteren
- Lampen samles igen.

Skift af pære EuroLight C og CombiLight C

- Skru lampen af otoskophovedet
- Fjern forsigtigt den sorte plastikbøsning fra pæren.
- Skru en ny ren pære i hovedet og slut med plastikbøsningen.

Rengøring

OBS, otoskopet må ikke komme i kontakt med væske!

Ydersiden tørres med fnugfri opvredet klud. Der kan anvendes svagt rengøringsmiddel eller alkoholbaseret desinfektionsmiddel.

Må IKKE steriliseres, må IKKE anvendes aggressive rengøringsmidler, glas må kun rengøres med glasrens. Genanvendelige øretragte SKAL desinficeres.

Andre mulige anvendelser af håndtaget

På otoskophovedet er der tilslutning til at sætte en adapter til pneumatisk test.

Skru hovedet af otoskopet og andre instrumenter kan skrues i fx larynxspejl, tungeholder, næsespeculum eller næselys.

Tekniske specifikationer

Temperatur

Opbevaring:	-10°C til + 45°C
Transport:	- 20°C til + 50°C
Anvendelse:	+5°C til + 40°C

Omgivelsernes fugtighed: 30 % - 75 %