


Anvendelse

Beholdere til analysesystemer bruges til optagelse af prøvemateriale (f.eks. serum, plasma eller kontrolopløsninger) med henblik på den efterfølgende analyse i tilsvarende analysesystemer (se nedenstående tabel).
Prøvematerialet, som findes i beholderne til analysesystemer, kan tilføres til automatisk eller manuel behandling af prøver. Anvisningerne fra apparatets producent skal følges.
Produkterne er beregnet til brug i et professionelt miljø og til at blive brugt af medicinsk fagpersonale og laboratoriepersonale.

Produktbeskrivelse

Beholderne til analysesystemer tilbydes i forskellige varianter. De adskiller sig med hensyn til opbevaringsvolumen, dimensioner, bundens form og forskellige lukkemuligheder. Derudover fås sterile og ikke-sterile varianter.

Produktoversigt

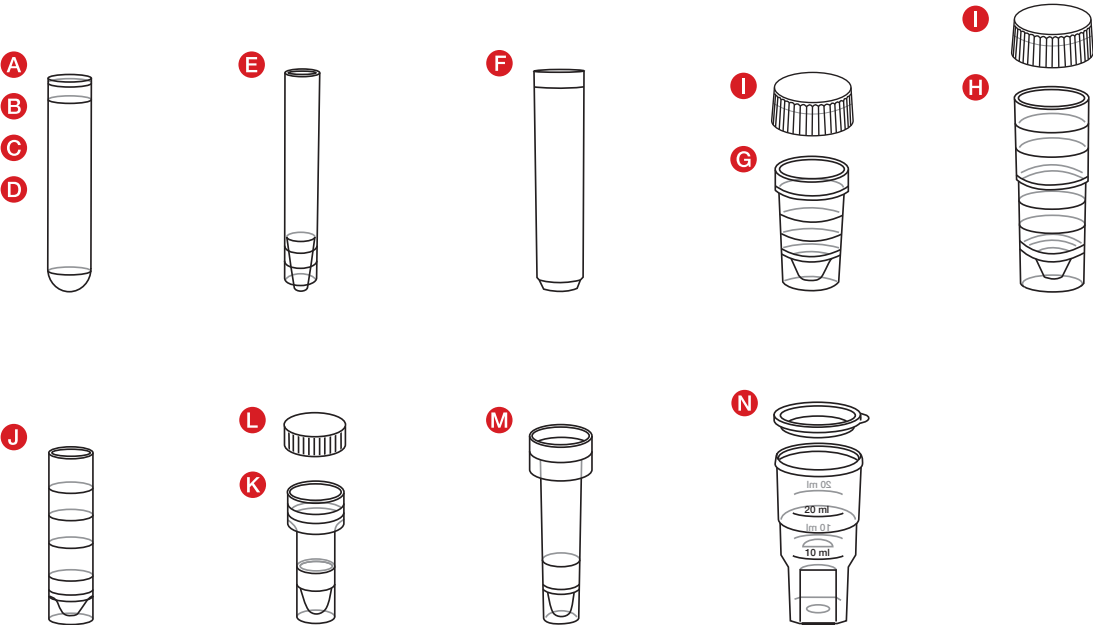

Beholdere til analysesystemer

Type	Varenummer	Beskrivelse
A	55.1578	Rør, 5 ml, 75x12 mm, rund bund, højtransparent, velegnet til FACScan flowcytometer
B	55.1579.xxx	Rør, 5 ml, 75x12 mm, rund bund, højtransparent, velegnet til flowcytometre såsom FACSCanto, FACS Aria, FACSCalibur, LRS2, FC500
C	55.476.061	Rør, 5 ml, 75x12 mm, rund bund, egnet til Vitek og Vitek 2 fra bioMérieux
D	55.526.053	Rør, 5 ml, 75x12 mm, rund bund, PS, egnet til Abbott m1000
E	57.477.500	Rør, 4,5 ml, 75x12 mm, spids bund, til Pharmacia/LKB Gamma Counter og Gamma Counter Cobra fra Packard
F	68.752	Rund cuvette 3,5 ml, højde: 51 mm, egnet til LKB-Analyzer og til forberedelse af prøver
G	73.641.xxx	Prøvebeholder 24x14 mm til Kone-Analyser, 73.641.010 til AAS
H	73.646	Prøvebeholder 38x14 mm til autoanalyser
I	65.649	Låg til autoanalyser-prøveholdere passende til 73.641.xxx, 73.646.xxx
J	73.663	Prøvebeholder 2 ml til Boehringer ES300/600
K	73.666	Prøvebeholder 2 mm, 38x17 mm, til Hitachi autoanalyser
L	65.718	Låg til Hitachi-beholder, passende til 73.666
M	73.667	Prøvebeholder 2 ml til Abbott AxSYM
N	73.650.500	Prøvebeholder 60x34 mm til Coulter Counter med vedlagt låg

Sikkerheds- og advarselsinformationer

Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget.

1. Generelle forholdsregler: Brug handsker og almindeligt personligt værnemiddel for at beskytte dig mod mulig eksponering for potentielt infektiøst prøvemateriale og overførte patogener.
2. Håndtér alle biologiske prøver og prøvetagningshjælpemidler i henhold til din organisations politikker og procedurer.
I tilfælde af direkte kontakt med biologiske prøver skal du søge læge, da HIV, HCV, HBV eller andre infektiøse sygdomme kan overføres.
Din organisations sikkerhedsretningslinjer og -procedurer skal altid følges.
3. Kontrollér hver enkelt emballage for skader inden brug, og brug ikke indholdet, hvis emballagen er beskadiget.
4. Beholdere til analysesystemer er beregnet til engangsbrug. Bortskaf alle produkter i affaldsholdere beregnet til biologiske farlige stoffer.
5. Produkterne må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Holdbarheden for beholdere til analysesystemer slutter den sidste dag i den angivne måned og det angivne år.

Opbevaring

Produkterne skal opbevares ved stuetemperatur.

Håndtering

Brug handsker, kitel, øjenbeskyttelse eller andet passende værnemiddel til beskyttelse mod blodbårne patogener eller potentielt smitsomme materialer.

Beholdere til analysesystemer

1. Åbn poseemballagen, og tag beholdere til analysesystemer ud af den.
2. Fyld den respektive beholder til analysesystemer med dit prøvemateriale. Sørg for at beholderen til analysesystemer ikke er fyldt over den nominelle volumen.
3. Ved anvendelse i maskiner eller inden for automation skal anvisningerne fra apparatets producent følges.
4. Luk beholderen til analysesystemer igen ved hjælp af et passende låg.

Bortskaffelse

1. De generelle hygiejneretningslinjer og de lovmæssige bestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøse materialer skal følges og overholdes.
2. Engangshandsker formindsker risikoen for infektion.
3. Kontaminerede eller fyldte beholdere til analysesystemer skal bortskaffes i egnede bortskaffelsesbeholdere til biologisk farlige stoffer, som efterfølgende kan autoklaveres og brændes.
4. Bortskaffelsen skal ske i et egnet forbrændingsanlæg eller ved hjælp af autoklaving (dampsterilisering).

Symbol- og identifikationsnøgler:

	Varenummer
	Batchbetegnelse
	Mindst holdbar til
	CE-mærke
	Til in vitro-diagnostik
	Følg brugsanvisningen
	Ved genanvendelse: Fare for kontamination
	Opbevares beskyttet mod sollys
	Opbevares tørt
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Producent
	Fremstillingsland

Derudover gælder følgende for sterile produkter:

	Sterilisering gennem bestråling
	Enkelt sterilt barriersystem
	Må ikke steriliseres igen

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal meddeles producenten og den ansvarlige nationale myndighed.