

Påtænkt anvendelse

Minivette® POCT anvendes til blodtagning fra kapillærer i henhold til end-to-end kapillærørsprincippet. Minivette® POCT bruges til opsamling og umiddelbar afgivelse af en defineret mængde kapillærblod til øjeblikkelig diagnose. Produktet er beregnet til brug i et professionelt miljø og til brug af medicinske specialister.

Produktbeskrivelse

Minivette® POCT består af et kapillærør af plastik og et stempel samt forskellige additiver (præparater). Minivette® POCT uden additiv fås også. Valget af additiv afhænger af den analytiske testmetode. Den angives af producenten af testreagenser og / eller analyseenheden, testpatronen eller teststrimlen, hvorpå testen bliver gennemført.

Farvekode for Minivette® POCT:

Additiv	Bogstavskode	Stempelfarve iht. ISO 6710	Stempelfarve iht. BS 4851*
Neutral			
Minivette® POCT 10 µl neutral	Z	hvid	hvid
Minivette® POCT 20 µl neutral	Z	hvid	hvid
Minivette® POCT 50 µl neutral	Z	hvid	hvid
Minivette® POCT 100 µl neutral	Z	hvid	hvid
Minivette® POCT 200 µl neutral	Z	hvid	hvid
Lithiumheparin-beholder			
Minivette® POCT 20 µl med lithiumheparin	LH	grøn	orange
Minivette® POCT 50 µl med lithiumheparin	LH	grøn	orange
Minivette® POCT 100 µl med lithiumheparin	LH	grøn	orange
Minivette® POCT 200 µl med lithiumheparin	LH	grøn	orange
EDTA-beholder			
Minivette® POCT 20 µl med K3 EDTA	K3E	violet	rød
Minivette® POCT 50 µl med K3 EDTA	K3E	violet	rød
Minivette® POCT 100 µl med K3 EDTA	K3E	violet	–
Minivette® POCT 200 µl med K3 EDTA	K3E	violet	–

*British Standard BS4851:1982 Specification for single use labelled medical specimen containers for haematology and biochemistry.

SARSTEDT Minivette® POCT neutral

Minivette® POCT neutral indeholder ingen præparering. Den lokale og definerede mængde kapillærblodkan anvendes umiddelbart efter blodtagning til øjeblikkelig diagnostik.

SARSTEDT Minivette® POCT lithiumheparin

Minivette® POCT lithiumheparin er belagt med antikoagulationsmidlet lithiumheparin. Den antikoagulerede og definerede mængde kapillærblod kan anvendes umiddelbart efter blodtagning til øjeblikkelig diagnostik.

SARSTEDT Minivette® POCT K3 EDTA

Minivette® POCT K3 EDTA er belagt med antikoagulationsmidlet K3 EDTA. Den antikoagulerede og definerede mængde kapillærblod kan anvendes umiddelbart efter blodtagning til øjeblikkelig diagnostik.

Sikkerhedsvejledninger og advarsler

1. Generelle forholdsregler: Brug handsker og andre almindelige personlige værnemidler til at beskytte dig mod blod og mulig eksponering for blodbårne patogener.
2. Håndtér alle biologiske prøver og skarpt / spidst blodtagningsudstyr (lancetter) i henhold til din institutions retningslinjer og procedurer. I tilfælde af en direkte kontakt med biologiske prøver eller en stikskade, skal der søges læge, da HIV, HCV, HBV eller andre infektionssygdomme kan overføres. Brug sikkerhedslancetter. Din institutions sikkerhedsretningslinjer og -procedurer skal følges.
3. Bortskaf alle skarpe/spidse genstande (lancetter) til blodprøvetagning fra kapillærer i egnede affaldsbeholdere til biologisk farlige stoffer.
4. En underfyldning af Minivette® POCT fører til et forkert forhold mellem blod og præparat/additiv og kan føre til forkerte analyseresultater. (En overfyldning kan Minivette® POCT udelukkes, fordi blodstrømmen i Minivette® POCT stoppes af filteret).
5. Det blod, der er udtaget og behandlet ved hjælp af Minivette® POCT, er ikke beregnet til geninjicering i den menneskelige krop.
6. Brug ikke en Minivette® POCT efter holdbarhedsdatoen. Holdbarheden af en Minivette® POCT slutter på den sidste dag i den angivne måned og det angivne år.

Opbevaring

Produktet skal opbevares ved stuetemperatur.

Prøvetagning og håndtering

LÆS HELE DOKUMENTET OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN DU PÅBEGYNDER BLODPRØVETAGNINGEN FRA KAPILLÆRER.

Påkrævet, ikke medfølgende arbejdsmateriale til blodprøvetagningen fra kapillærer:


1. Brug handsker, kitel, øjenbeskyttelse eller andre passende værnemidler til beskyttelse mod blodbårne patogener eller potentielt smitsomme materialer.
2. Desinfektionsmateriale til rengøring af prøveudtagningsstedet (følg anordningens retningslinjer for klargøring af stedet for prøveudtagningen). Brug ikke alkoholbaserede rengøringsmidler, hvis prøverne skal bruges til test af blodalkohol.
3. Tørre, kimfattige desinfektionsservietter.
4. Sikkerhedslancet, incisionslancet.
5. Affaldsbeholder til skarpe / spidse genstande.
6. Tilhørende testkit.

Kapillærteknik med Minivette® POCT

Generelle anvisninger:

TIL MINIMERING AF EKSPONERINGSRISIKOEN UNDER BLODPRØVETAGNINGEN SKAL DER BRUGES HANDSKER.

1. Vælg egnet Minivette® POCT for den påkrævede prøve.
2. Vælg punkturstedet med en sikkerhedslancet. Følg organisationens retningslinjer for klargøring af indstiksstedet.

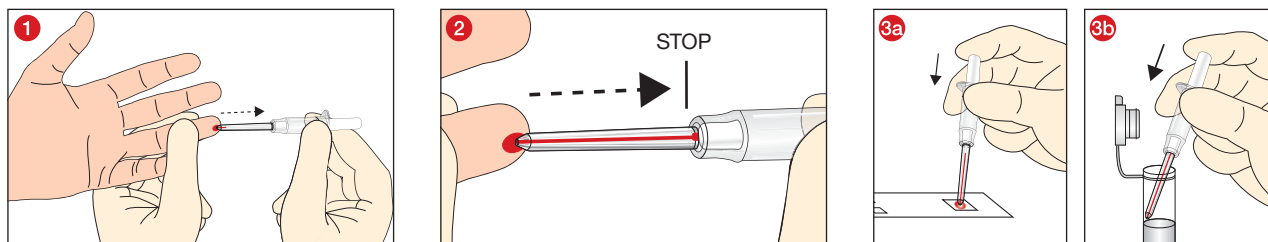

1. Tag fat i Minivette® POCT i siden under holdevingerne, og hold den i en vandret og let skrånende position. Ved opsamling af bloddråberne med kapillærspidsen må ventilationshullet ved stempelenden ikke tildækkes. Tryk ikke stemplet ind, og fyld kapillærrøret, uden at der dannes bobler.
2. Blodprøvetagningen afsluttes automatisk, når kapillærrøret er fyldt med blod op til det hvide spærrefilter.
- 3a. Sæt spidsen af kapillærrøret på testfeltet, og overfør indholdet ved at presse stemplet forsigtigt ned på testkortet.
- 3b. Alternativt kan prøven afgives i en mikroprobebeholder.

Bortskaffelse

1. De generelle hygiejneretningslinjer samt de lovmæssige bestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøse materialer skal følges og overholdes.
2. Engangshandsker mindsker risikoen for infektion.
3. Kontaminerede eller fyldte kapillærrør skal bortskaffes i egnede bortskaffelsesbeholdere til biologisk farlige stoffer, som efterfølgende kan autoklaveres og brændes.
4. Bortskaffelsen skal ske i et egnet forbrændingsanlæg eller ved hjælp af autoklavering (dampsterilisering).

Produktspecifikke normer og retningslinjer i den til enhver tid gældende udgave

CLSI* GP39 "Tubes and Additives for Venous and Capillary Blood Specimen Collection", Approved Standard.

CLSI* GP42 "Collection of Capillary Blood Specimens", Approved Standard.

*CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)

Symbol- og identificeringskoder:



Varenummer



Batchnummer



Mindst holdbar til



CE-mærke



In-vitro-diagnostik



Følg brugervejledningen



Ved genanvendelse: Fare for kontaminering



Opbevares beskyttet mod sollys



Opbevares tørt



Producent



Fremstillingsland

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal meddeles producenten og den ansvarlige nationale myndighed.



SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstr. 1
D-51588 Nümbrecht
www.sarstedt.com



SARSTEDT