


10% Neutral Buffered Formalin

HOU/1000.0040, HOU/1000.0450, HOU/1000.1000, HOU/BAF-0010-99A,
HOU/BAF-2000-70A, HOU/BAF-5000-08A, HOU/BAF-6000-08A, HOU/BAF-9000-08A



Indeholder: Formaldehyd 1 - < 5

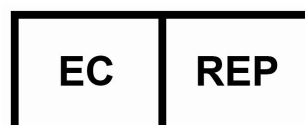

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



CellPath Ltd
80 Mochdre Enterprise Park,
Newtown, Powys, SY16 4LE, UK
T: +44 (0)1686 611333
E: sales@cellpath.com
cellpath.com



10% Neutral Buffered Formalin

HOU/1000.0040, HOU/1000.0450, HOU/1000.1000, HOU/BAF-0010-99A,
HOU/BAF-2000-70A, HOU/BAF-5000-08A, HOU/BAF-6000-08A, HOU/BAF-9000-08A

En neutral bufret formalinopløsning på 10 % beregnet til at blive brugt som fiksativ i forbindelse med behandlingen af biologiske væv eller kliniske prøver.

Klar til brug løsning.

Til laboratoriebrug.

Opbevares i et køligt, tørt, godt ventileret område. Hold beholderne tæt lukket. Opbevares i korrekt mærkede beholdere.

Se udløbsdatoen på produktetiketten.

Komponenter: Formaldehyde 1 - < 5%

Brugsanvisning

BEMÆRK: Nedsæk prøven i opløsning så hurtigt som muligt, forsinket fiksering påvirker kvaliteten af det endelige klargjorte objektglas til diagnose. Anbefalet volumen af fikseringsmiddel skal være 10 - 20 gange prøvens volumen, og prøverne skal være helt nedsænket. Lad prøven være nedsænket for at fikseres, og opbevar ved stuetemperatur.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.