



Kiilto Pro Hydragel

Forbehandling



Forbehandlingsmiddel til at forhindre udtørring og spredning af organisk snavs og sekret på instrumenternes overflade.

Anvendelsesområde	Forbehandlingsmiddel til situationer, hvor instrumenter ikke vaskes umiddelbart efter brug. Medicinsk udstyr. Til professionel brug.	
Produktegenskaber	Den gel-lignende spray fordeler sig jævnt på instrumenterne og danner en film på instrumenternes overflade, som forhindrer udtørring af organisk stof og sekret, hvilket gør rengøringen lettere. Behandlede instrumenter skal vaskes inden for 5 dage. Velegnet til almindeligt anvendte instrumentmaterialer. Hydragel er vandopløseligt og let at skylle af.	
Brugsanvisning	Sprayes direkte på instrumenterne, når de ligger i transportkassen. Det er vigtigt, at instrumenterne er helt dækket af den påførte gel. Følg sikkerhedsinstruktionerne for opbevaring og transport af instrumenter. Vask herefter instrumenterne som normalt.	
Bemærkning	Undgå kontakt med kemikalier, da det kan føre til korrosion eller ødelægge metaller. Kemikalierne kan forblive aktive under den beskyttende film. Ved stænk på gulvet er det vigtigt at rengøre med vand, da gulvet kan blive meget glat.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5%	Rengørende effekt
	Sæbe < 5%	Vaskeaktivt stof, opløser snavs
	Konserveringsmidler	Konserveringsmiddel
	Korrosionshæmmer	Forhindrer korrosion og dannelsen af mørke pletter
pH produkt	9.0	
Opbevaring	Opbevares ved 5-25°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.	
Udseende og duft	Gel	
Produktionsland	FINLAND	

**Anvendelses- og
miljøsikkerhed**

Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).

Læs brugsanvisning før brug.
Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Emballagematerialer

Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

6 x 750 ml

8222

6417964082227

6417964482959

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.