

OxyTrue® SC

Fingerpulsoximeter

Varenummer 0015.0320

ANVENDELSE

Ikke-invasiv måling af puls og funktionel oxygenmætning (SpO₂) gennem patientens finger.

Kan anvendes på både voksne og børn fra ca. 4 år.

Kan betjenes af medicinsk personale såvel som patienten selv.

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet. Tjek altid, at der ikke er synlige skader på apparatet inden brug.

FORBEREDELSE / PATIENT

1. Højintenslys i omgivelserne kan påvirke resultaterne.
2. Mål ikke på fingre med neglelak, da det blokerer lyset.
3. Mål ikke på samme arm, som fx er påsat manchet til blodtryksmåling.
4. Sørg for at have tørre fingre.

KORT BRUGSANVISNING

1. Isæt to AAA batterier i batterilommen. Vær opmærksom på, at vende batterierne rigtigt efter polaritetsmærkerne. Sæt låget på igen.
2. Tryk kort på knappen for at tænde.
3. Sæt fingeren i klemme i apparatet med neglen opad mod displayet.
4. Slip klemmen, så fingeren holdes fast.
5. Oximeteret starter målingen automatisk.
6. Oximeteret slukker automatisk, når fingeren tages ud.



AFLÆSNING AF RESULTATER

1. Iltmætningen, % SpO₂
2. Pulsslag pr minut, BPM
3. Visning af pulsbølger kan slås til og fra

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Tåler aftørring med desinfektionsserviet 70 % alkohol. Undgå at væske kommer ind i apparatet. Rengør mellem hver patient. Desinfektion er muligt ved at følge producentens anvisninger om brug af klorbaserede desinfektionsmidler.

Skift batterier, ved indikation fra ikonet i displayet. Fjern batterierne, hvis apparatet ikke anvendes i over en uge, dette forhindre skader fra batterilækage.

Beskyt mod kraftige stød og vibrationer, snavs og fugt.

Oximeteret er kalibreret fra fabrikken og skal ikke kalibreres.

SYMBOLER OG KNAPPER

1. Batteristatus
2. SpO₂ % iltmætning
3. Signalværdi, grøn = god, gul = middel, rød = dårlig
4. BPM pulsslag per minut
5. Pulsbølgekurve
6. Multifunktionstast
 - Tænd enheden
 - Skift skærmvisning
 - Reguler lysstyrke - hold nede mere end et sekund