


2 Blodsuktermålinger

niveau og forkert behandling.

Før du udfører din første blodsuktermåling, skal apparatet indstilles korrekt. Du skal bruge apparatet, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancet.

1

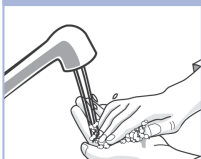

Vask og tør hænderne.

2

Klargør fingerprikkeren.

3



Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet.

4




Isæt teststrimlen i apparatet i pilenes retning. Apparatet tændes og bipper.

5




Når blodråbesymbolet blinker, skal du lave et prik i fingeren med fingerprikkeren.


6

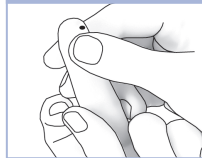

Massér fingeren forsigtigt for at øge blodtilførslen. Dette hjælper dig med at få en blodråbe frem.

7

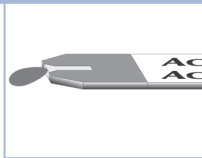

Lad blodråben berøre den **forreste kant** ved det gule vindue på teststrimlen. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen. Apparatet bipper, og  blinker, når der er tilstrækkeligt blod i teststrimlen.