

Quickguide

Contour XT, blodsuktermåler

Hounisenvarenummer: 0010.0226

Denne Quickguide kan ikke stå i stedet for den oprindelige manual, der følger med produktet.

Anvendelsesområde

Contour XT, anvendes til patienternes egen måling af her og nu blodsukker, samt af sundhedspersonale til overvågning af blodsukkerkoncentration i frist kapillært fuldblod. Prøven tages på fingerspidsen. Her gives svar på kvantitativ måling af blodsukker fra 0,6 mmol/l til 33,3 mmol/l.

Forberedelse til blodtryksmåling

1. Batterier, 2 x CR2032, 3v
2. Vask og tør altid hænderne grundigt.
3. Tag en teststrimmel og sæt den grå ende i teststrimmelporten i bunden af apparatet.
4. Apparatet tændes, der vises en blinkende bloddråbe, der angiver at apparatet er klar.
5. Tag hættten af fingerprikkeren. Drej den hvide del et hak til højre og tag hættten af.
6. Løsn den runde beskyttelsehætte på lancetpakken, drej blot ¼ og tag ikke låget helt af.
7. Sæt lancetten helt ind i fingerprikkeren, til den ikke kan komme længere.
8. Skru den runde hætte helt af lancetten.
9. Sæt enden på fingerprikkeren på igen, og drej den et hak tilbage igen.

Måling af blodsukker


1. Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, det er en god ide at prikke på siden af en finger, da det giver mindst gene efterfølgende.
2. Tryk på fingerprikkeren, så der kommer hul på fingeren.
3. Gnid hånd og finger hen mod indstiksstedet, uden at ramme hullet og bloddråben.
4. Sæt teststrimlens ende ved siden af bloddråben så blodet løber ind i strimlen. Vent til apparatet bipper.
5. Apparatet bipper og tæller ned.
6. Resultaterne vises straks efter.
7. Hvis der ikke er blod nok, har du 20 sekunder til at tilføre mere blod, ellers skal du starte forfra.
8. Fjern teststrimlen og bortskaf som risikoaffald.
9. Sluk apparatet.

Aflæsning af resultater


Blodsukkerkoncentrationen målt i mmol/l ses med store tydelige tal på displayet.

Rengøring


Ydersiden kan rengøres med en fugtig fnugfri serviet med mildt rengørings- eller desinfektionsmiddel. Vigtigt at det ikke bliver vådt og især at der ikke kommer væske i teststrimmelporten, batterilåget og rundt om knapperne.

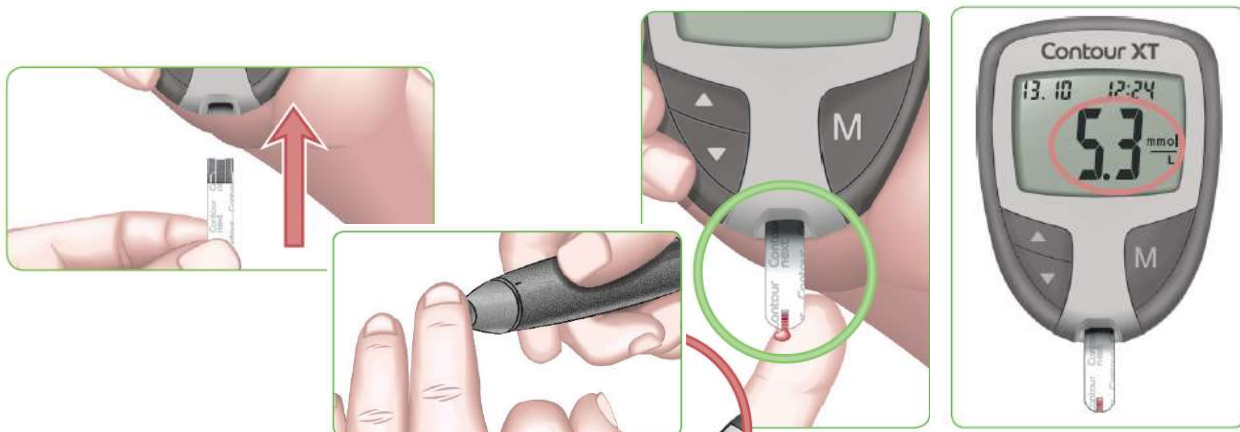

Dit CONTOUR®XT-apparat

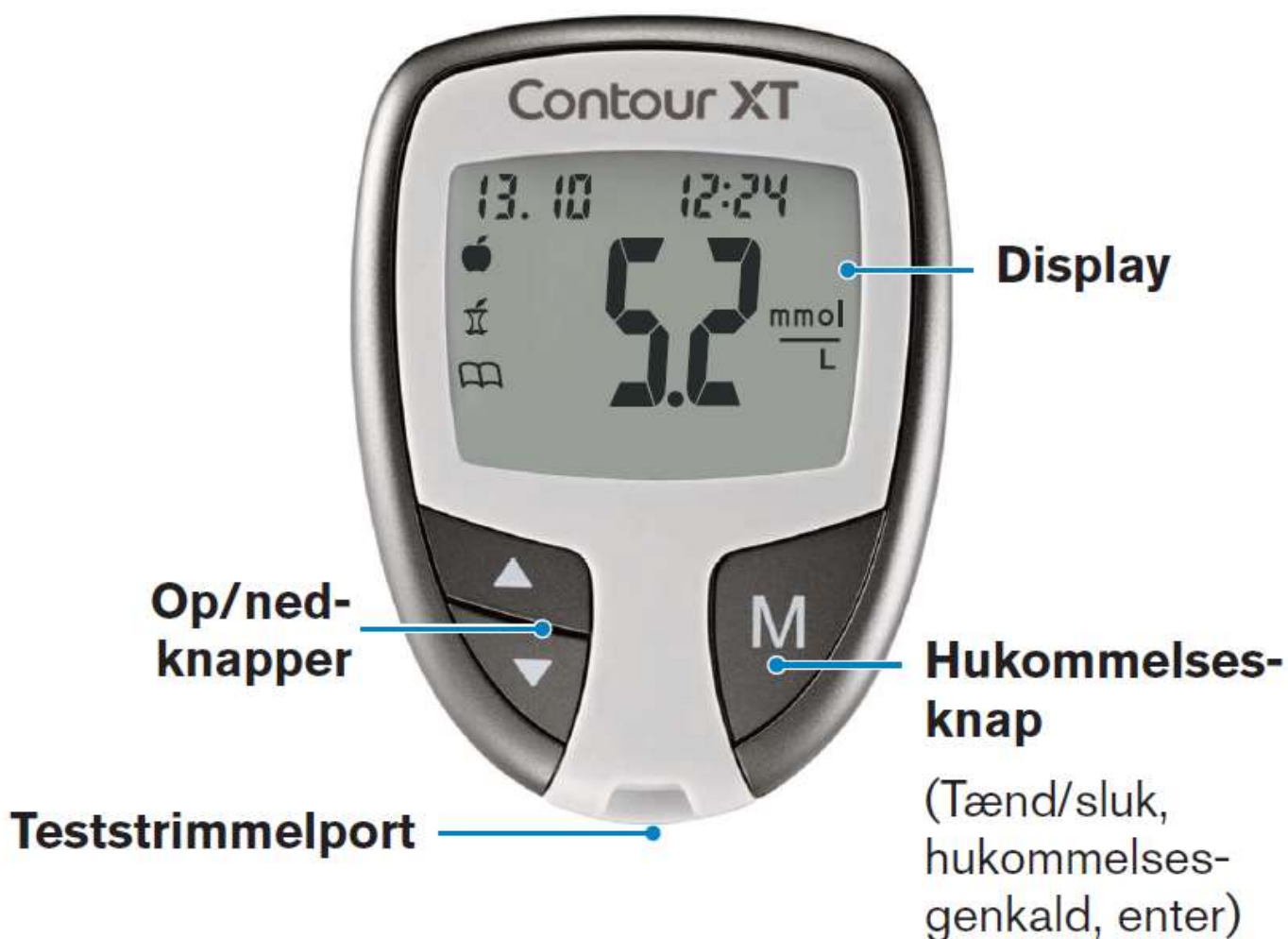

Din CONTOUR®NEXT-teststrimmel

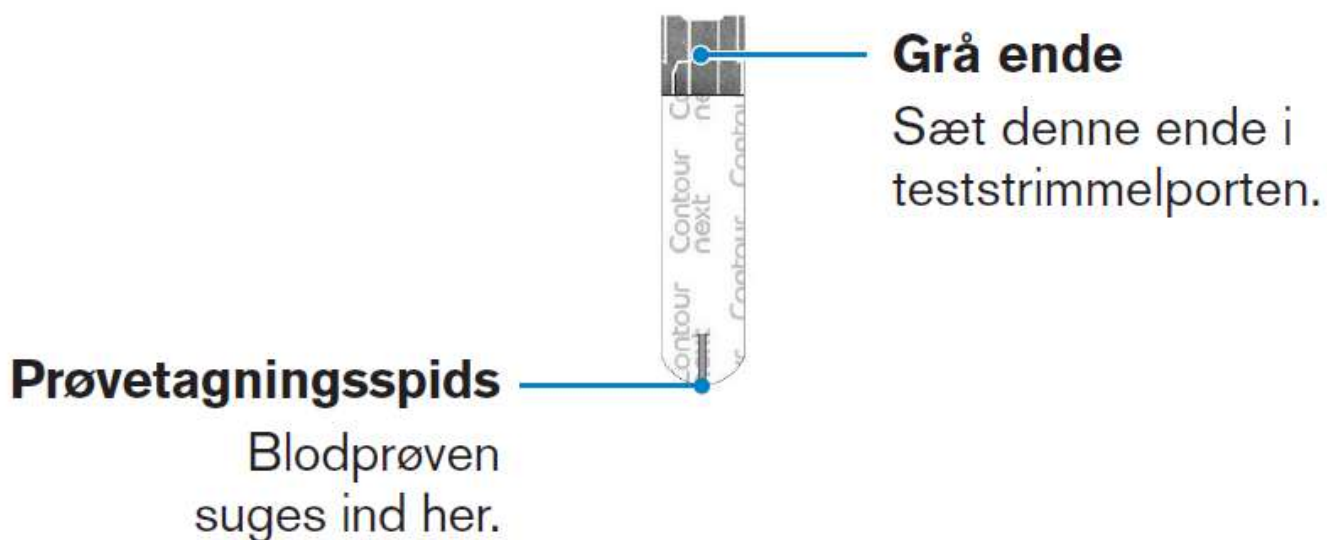

Apparatets display

Billedet herunder viser alle symboler, der kan vises på apparatets display. Tryk på ▲ eller ▼ og hold den nede for visning, når apparatet er slukket. Alle displayets segmenter kommer til syne i 10 sekunder. Hvis du har brug for mere end 10 sekunder til at kontrollere displayet, skal du igen trykke på ▲ eller ▼ og holde knappen nede.

Når alle tegnene vises er det vigtigt at kontrollere, at 8.8.8 vises fuldstændigt. I tilfælde af manglende segmenter henvises der til afsnittet Fejlkode og -symboler (side 32-34). Dette kan påvirke, hvordan du ser resultatet.

88/88

Den øverste del af displayet viser dato og klokkeslæt.



Markør for resultat før måltid.



Markør for resultat efter måltid.



Angiver en registrering i dagbogen.



Angiver, at der er indstillet en påmindelse.



Angiver, at lyden er slået til.



8.8.8 Det midterste område af displayet viser enten resultatet eller eventuelle fejlkode.



Angiver at apparatet er klar til måling



Markør for kontrolresultat.



Angiver, at det er for koldt eller for varmt til, at apparatet kan opnå nøjagtige resultater.

AM eller PM

kommer frem, hvis apparatet er indstillet til 12-timersvisning.



Batteristanden er lav, og batterierne skal udskiftes. Dette symbol bliver på displayet, indtil batterierne er blevet udskiftet.

d.m/d
viser datoformatet.

mmgl
7dL

Resultaterne vises i mmol/l eller mg/dl. 7-tallet vises, når oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier de sidste 7 dage ses.

A

Angiver gennemsnitsværdien.