
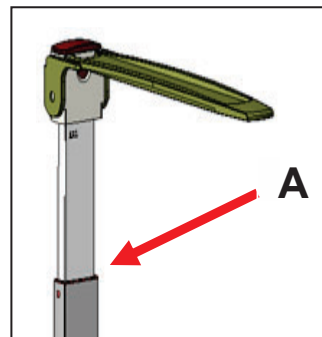
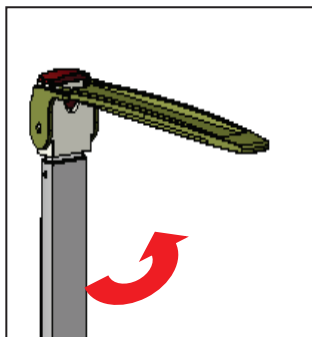





## 7 Højdemåling

Højde over 120 cm:

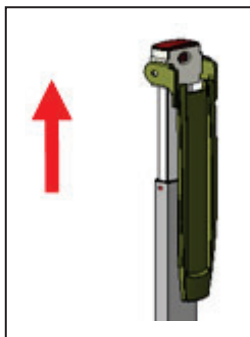

1. Træk målestokken op.
2. Stil hovedstopanslaget i vandret position ved at folde det ud indtil det låser på plads.
3. Tryk forsigtigt målestokken ned indtil hovedstopanslaget berører personens hoved. Aflæs kropshøjden på skalaen (tegn A).

Højde op til 120 cm

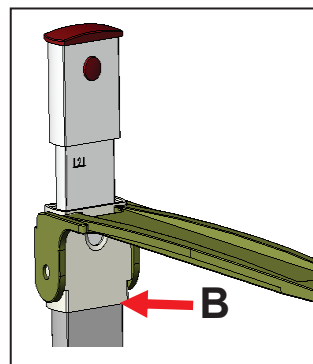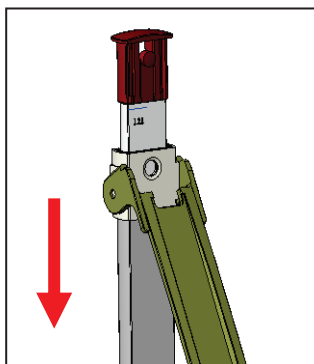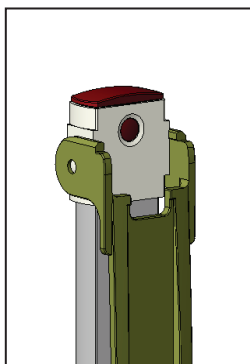

4. Tryk låsen ned og hold den nedtrykt.
5. Flyt hovedstopanslaget ned.  
Herefter stil hovedstopanslaget i vandret position ved at folde det ud indtil det låser på plads.
6. Tryk forsigtigt målestokken ned indtil hovedstopanslaget berører personens hoved.  
Aflæs kropshøjden på skalaen. (tegn B).