



Sekusept® aktiv

Aktiv rengøring og effektiv
desinfektion af alle
instrumenttyper

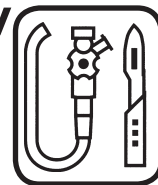

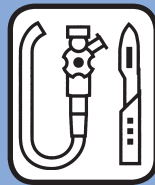

Sekusept Fordele

Desinfektion

Testet i henhold til den tyske organisation for Hygiejne og Mikrobiologi. Registreret og certificeret.

Viruseffektivitet imod HBV, HIV og DW virus (Adeno, Papova, Vaccinia og Polio).

Kort kontakttid grundet en højeffektiv produktsammensætning.

Lav brugskoncentration.

Rengøring

Maximal rengøringseffektivitet.

Materialevenligt

Må ikke anvendes til instrumenter fremstillet af messing og/eller kobber samt til mekanisk skadede instrumenter med chrom- og/eller nikkelbelægninger

Reduceret skumdannelse.

Granuleret produkt.

Reagerer ikke med andre stoffer.

Test-strips til kontrol.

Resultat

Standardiseret resultat for brugeren.

Officiel garanteret test med sikkerhed for resultat i situationer med risiko for forskellige typer af virusinfektioner.

Kort klargørings tid for instrumenter.

Økonomisk i anvendelse.

Effektivt rengøringsresultat selv ved meget besmudsede instrumenter. Tidsbesparende ved reduceret forbehandling. Bedre renhed. Perfekt resultat.

Universelt anvendeligt til alle instrumenter, specielt til fleksible endoskoper og følsomme materialer som silikone, polycarbonater, polysulfoner og plexiglas. Anvendeligt til ultralydsbade.

Særligt anvendeligt til endoskoper i semi-automatiserede processer

Kan bruges overalt - også til endoskoper med meget lille diameter.

Velegnet til forbehandling før mekanisk rengøring, specielt ved brug af aldehydholdige produkter.

Brugertest, specielt ved kraftig organisk besmudsning.

Anvendelse

Til rengøring og desinfektion af endoskoper og instrumenter

Manuel proces

Placér instrumentet i Sekusept aktiv omgående efter brugen. Det er vigtigt, at instrumenterne er helt tildækkede og fri for skumbobler m.v.

Fjern instrumenterne efter den angivne indvirkningstid og afskyl med vand eller helt ideelt -demineraliseret vand.

Ultralydsbade

Sekusept aktiv er velegnet til brug i alle rustfrie ultralydsbeholdere. (Når instrumentproducenten foreskriver ultralydsbehandling af instrumenter.)

For effektiv desinfektion - i.h.t. den tyske organisation for Hygiejne og Mikrobiologi (DGHM) - skal indvirkningstiden på 15 minutter overholdes.

Sekusept aktiv er særdeles velegnet til forrengøring og desinfektion af fleksible endoskoper.

Der er ingen risiko for beskadigelser af maskiner ved brug af Sekusept aktiv.

Anvendelses områder

Sekusept aktiv er anvendeligt til manuel rengøring og desinfektion af termolabile medicinske instrumenter incl. fleksible endoskoper.

Særligt velegnet til semi-automatiseret rengøring af endoskoper.

Til manuel forrengøring af endoskoper før mekanisk rengøring.

Til ultralydsbade

Velegnet til:

- Hospitaler
- Praktiserende læger
- Laboratorier
- Pharma industri



Effektiv og aldehydfri...

Sekusept aktiv er effektivt og garanterer en særdeles god brugssøkonomi bl.a. på grund af den lave brugskoncentration. Det aldehydfri koncept og den gode materialeforenelighed er medvirkende til en lang levetid på instrumenterne.



Rengøring

Rengøringen af kontaminerede instrumenter er et af de vigtigste elementer for en effektiv desinfektion. Kraftig besmudsning som blod, proteiner og kropsskuder, som ikke kan fjernes ved rengøring, kan nedsætte den efterfølgende desinfektionseffekt.


Kontaminerede instrumenter forøger risikoen for infektioner. Af hensyn til personalet er det vigtigt, at der sker en omgående desinfektion efter brug. Igennem den højaktive rengøringskraft og den beskyttelse mod proteinfiksering, der er i Sekusept aktiv, kan en effektiv desinfektion opnås.

På grund af instrumenternes konstruktion som f.eks. endoskoper og MIC instrumenter stilles der høje krav til rengøringseffekten, hvilket Sekusept aktiv kan opfylde.

Sekusept aktiv er udviklet med det mål at opnå det højeste renhedsresultat. Produktets kraftige effekt er resultatet af intensive laboratorietests og praktiske tests.




Sekusept aktiv 1 %

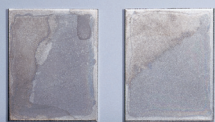


Sekusept aktiv 2 %


For at kontrollere rengøringseffektiviteten påføres rustfrie stålplader blod. Afprøvningen er udført med forskellige desinfektionsopløsninger med forskellig indvirkningstid. Der er ikke anvendt yderligere mekanisk rengøring.

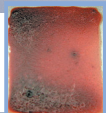

Blodkontamineret kontrolplade uden påvirkning.

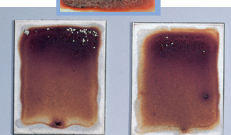


Aldehydfri produkt efter 15 minutter.

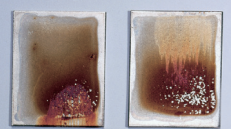

Aldehydfri produkt efter 1 time.

Desinfektion


Kombineret med en god rengøringssevne er de mikrobielle aktivitetsspektrer mod bakterier, svampe og specielt mod vira af meget stor betydning.

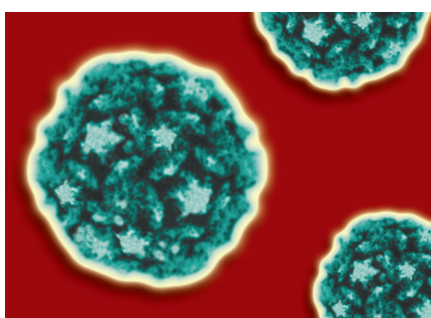

Polio - virus

Polio-virus er meget modstanddygtigt over for desinfektionsmidler. Sekusept aktiv virker effektivt med en kort kontaktid mod Polio-virus. Dette skyldes at Sekusept aktiv ved kontakt med vand danner stoffet Pereddikesyre.

Pereddikesyre

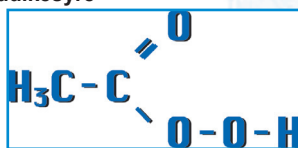

Materialeforenelighed

Ud over rengøring og desinfektion stilles der også krav til, hvordan rengøringsopløsningen påvirker det materiale, instrumenterne er fremstillet af.

Instrumenter består ofte af flere forskellige materialer, og der skal derfor tages hensyn til, hvordan rengøringsproduktet påvirker disse materialer.

Sekusept aktiv må ikke anvendes til instrumenter fremstillet af messing og/eller kobber samt mekanisk skadede instrumenter med chrom og/eller nikkelbelægninger.

Sikkerhedstest

Teststrips

Sekusept aktiv test strips kan bruges til at teste, om produktet stadig er effektivt.

Det anbefales at bruge testen, når opløsningen har været udsat for stor belastning.


Mikrobiologiske og virologiske testresultater

	Koncentration %	Tid
Instrument desinfektion i.h.t DGHM		
Ultralydsbad	1,0	60 minutter
	2,0	15 minutter
Effektivitet over for:		
- HBV og HIV i DNA polymerase test	1,0	15 minutter
	2,0	5 minutter
- Adeno, Papova, Vaccinia, Polio	1,0	60 minutter
	2,0	15 minutter

Sekusept® aktiv

Aktiv instrumentrengøring og -desinfektion

Effektiv over for bakterier (incl. Tbc), Svampe, DVW- virus, Hepatitis-B-virus (HBV) og HIV

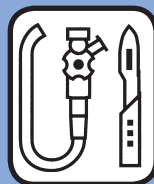

ECOLAB®

Sekusept® aktiv

Aktiv instrumentrengøring og desinfektion

Indhold:

Antimikrobielle aktiver
Nonioniske tensider
Kompleksbinder
Korrosionsinhibitorer

100 g aktivt produkt indeholder:

50 g Natriumperboratmonohydrat
25 g Tetraacetyldiamine (TAED)

Anvendelsesområder:

Til rengøring og desinfektion af instrumenter fremstillet af plastik, glas m.v.
Særlig anvendeligt til desinfektion og forrengøring samt slutdesinfektion af fleksible endoskoper

Emballage



1,5 kg plastspand
100 g pose

Effektivitets test

Test strips 4 x 50 stk. pr. box

Testresultater

Sekusept aktiv er testet mikrobiologisk, virologisk, toksikologisk og økologisk.

Testrapport kan rekvireres.

Dosering

Brug doseringsbægret til fremstilling af brugsopløsning (30 ml = 20 gram)

2 % - opløsning
20 gram pr. ltr. vand

1 % - opløsning
10 gram pr. ltr. vand

Opløs Sekusept aktiv og lad denne stå i **ca. 15 minutter** - foretag omrøring.

Læg instrumenter m.v. i opløsningen.

Efter den anviste indvirkningstid fjernes instrumenterne igen og skylles med postevand eller med destilleret vand.

Opløsningen skal fornyes ved hver arbejdsdags begyndelse.

Det anbefales at benytte teststrips jævnligt for at kontrollere produktets effektivitet - specielt hvis brugsopløsningen har været udsat for kraftige belastninger.

CE 0297

Ecolab tilbyder totalløsninger og service, der dækker alle former for hygiejne i institutioner og virksomheder,
- lokalt, på europæisk plan og worldwide.
Ecolab - Deres partner for totale hygiejneløsninger.

10.03

ECOLAB®

Ecolab ApS
Carl Jacobsens Vej 29
DK-2500 Valby
Tlf. 36 15 85 85

Ecolab a.s
Stålverksvejen 1, Etterstad
N-0605 Oslo
Tel. 22 68 18 00

Ecolab AB
Fruängsplan 10
S-129 07 Hägersten
Tel. 08 - 603 22 00

Oy Ecolab Ab
Mäkeläkatu 54 A
FIN-00510 Helsinki
Puh (09) 396 551

www.ecolab.com