

Quick guide URYXXON® Relax

Urintest og daglig vedligehold

Test friske urinprøver indenfor 2 timer. Nedkølede urinprøver opvarmes til stuetemperatur, inden testen påbegyndes (15-30 °C).

Læs denne vejledning grundigt, og følg proceduren omhyggeligt, når testen udføres.


Foretag en urintest



Step 1: Tænd analyseapparatet. Tjek, at slæden til teststrimlen er ren.




Step 2: Dyp teststrimlen i urinprøven. Vær sikker på, at alle testfelter bliver våde. Tag teststrimlen op af urinen efter 1 sekund. Tør bagsiden af teststrimlen af ved at trække den over kanten på urinbægeret for at fjerne overskydende urin. Benyt URYXXON® Stick 10 teststrimler, Hounisen varenummer 0010.0251

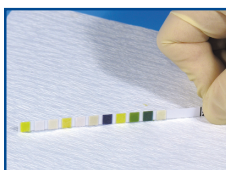

Step 3: Tør overskydende urin af siderne på teststrimlen på en serviet eller lignende (ca. 1 sekund).



Step 4: Placer teststrimlen i slæden. Vær sikker på, at testfelterne vender opad. Målingen starter automatisk. Strimlen trækkes ind i apparatet efter ca. 30 sekunder. Vigtigt! Fjern ikke teststrimlen, før målingen er færdig.

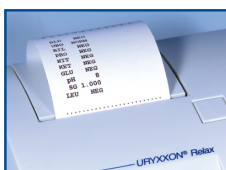

Step 5: Når målingen er færdig, printes og udskrives resultatet automatisk.



Step 6: Bortskaf den brugte teststrimmel. Tør slæden af med en desinfektionsserviet, Hounisen varenummer 1380.1000

Daglig vedligehold



Rens slæden med vand og desinfektionsserviet én gang dagligt.



- 1) Sluk analyseapparatet.
- 2) Træk i slæden for at fjerne den fra instrumentet.
- 3) Skyl slæden med koldt vand.
- 4) Fjern alle krystaller med en blød børste eller serviet.
- 5) Tør den efterfølgende med en desinfektionsserviet, Hounisen varenummer 1380.1000
- 6) Tør efter med en ren serviet, og indsæt slæden i instrumentet.

Udskiftning af printerpapir



- 1) Åben printerens cover ved at trykke på knappen ved siden af papirsprækken.
- 2) Fjern den tomme rulle.
- 3) Rul ca. 10 cm papir ud, og indsæt den nye rulle.
- 4) Luk låget.



Kvalitetskontrol

Test negative og positive kontrolopløsninger, når en ny beholder med teststrimler åbnes. Benyt ikke vand som negativ kontrol.

Teknisk service

Hvis du har spørgsmål eller ønsker teknisk assistance, kontakt venligst Hounisens kundeservice.



Hounisen Laboratorieudstyr A/S
E-mail: salg@hounisen.com
Tel.: +45 86 21 08 00
www.hounisen.com/i-praxis



MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany
Germany and international:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-mail: info@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: sales-fr@mn-net.com