

VEJLEDNING

I din webbrowser på dine PC,
går du til:
online.isoeyes.com

Kalibrering

Du skal nu indstille EyeHANDY til din aktuelle skærm, så synstavler er korrekte i størrelse:

1. Du er på **forsiden** i app'en.
2. Vælg knappen **"Gå til klargøring..."**
3. Tryk på **"Kalibrering"**
4. Hold et kreditkort op mod skærmen og brug skyderen til at tilpasse kortets størrelse på skærmen. Når det passer, er skærmen kalibreret korrekt.

Standardafstand

Du skal nu indstille EyeHANDY til standardafstand:

1. Tryk på **"Vælg Afstand"**
2. og set slideren på 300 cm

Det kan du efterfølgende under de enkelte tests tilpasse:

Nærsynstest afvikles på 40 cm

Pelli Robson kontrast afvikles på 70 cm

Farvesynstest på 75 cm

Vælg din enhed

Du skal nu indstille hvilken enhed EyeHandy kører på:

1. Tryk på **"Vælg din Enhed"**
2. og vælg Neutral for nu, indtil din enhed optræder i listen over enheder.

Vælg Sprog

Du skal nu indstille hvilket sprog du vil køre på.

(Bemærk at denne feature er under tilpasning, så jeg vil anbefale at du her og nu anvender DANSK.)

Synstestoversigt

Tilbage på forsiden kan du trykke på **"Gå til valg af synstests"** for at se de tilgængelige tests.

Særligt om Pelli-Robson kontrasttest

App'en inkluderer:

- 3 kontrasttavler (venstre, højre og binokulært)
- En vejledning i anvendelse og registrering

Sådan bruges den:

- Placér tavlen i en passende afstand (typisk 70 centimeter).
- Du eller patienten scroller ned gennem tavlen under testen på pilene i højre hjørne.
- Til venstre for hver række står en **log-værdi** – det er den værdi, du skal registrere.

Eventuelt kan referenceark downloades på dette link:

