

VEJLEDNING

Sådan starter du ISOeyes tabletten:

1. Tænd tabletten

Hold tabletten vandret Hold knappen på venstre side inde, indtil tabletten starter op.

Tilslutning til WiFi:

- Klik på **indstillingssymbolet (tandhjulet)** nederst i rækken af app-symboler.
- Vælg **"Internet"** under indstillinger og opret forbindelse til det ønskede netværk.

Bemærk: App'en ISOeyes Eyetest kræver internetforbindelse for at fungere korrekt.

START AF APP'EN

På startskærmen:

- Klik på symbolet **ISOeyes Eyetest**, som jeg har placeret til dig.
- App'en loader herefter automatisk.

Kalibrering

Skærmen er allerede forudkonfigureret til korrekt skaleringsfaktor og lux-styrker,

Vil du selv prøve:

1. Gå til **forsiden** i app'en.
2. Vælg **"Gå til klargøring..."**
3. Tryk på **"Kalibrering"**
4. Hold et kreditkort op mod skærmen og brug skyderen til at tilpasse kortets størrelse på skærmen. Når det passer, er skærmen kalibreret korrekt.

LUX VÆRDIER

Da din konfigurerede tablet er sat til 50% lysstyrke er den under **"Vælg din enhed"** sat til "ISOeyes Tablet 50% skærmlys". Det sikrer de korrekte luxværdier til de forskellige synstest. Vigtigt at overholde dette, for et korrekt testmiljø!

Synstestoversigt

På forsiden kan du trykke på **"Gå til valg af synstests"** for at se de tilgængelige tests.

Særligt om Pelli-Robson kontrasttest

App'en inkluderer:

- 3 kontrasttavler (venstre, højre og binokulært)
- En vejledning i anvendelse og registrering

Sådan bruges den:

- Placér tavlen i en passende afstand (typisk 40 cm – 1 meter).
- Du eller patienten scroller ned gennem tavlen under testen på pilene i højre hjørne.
- Til venstre for hver række står en **log-værdi** – det er den værdi, du skal registrere.

Eventuelt kan referenceark downloades på dette link:

<https://da.isoeyes.com/blog/2025/02/25/reference-kort/>

Du er blandt de første...

- der har fået adgang til denne nye løsning! Selvom tabletløsningen stadig vokser med flere funktioner er den **fuldt funktionsdygtig og gennemtestet**. Du får løbende efter aftale adgang til nye funktioner – helt uden at skulle opdatere app'en manuelt, da den kører på en central server hos ISOeyes.

Det betyder hurtigere fejlretning og automatiske forbedringer.

