

Vejledning



TILBERED OPLØSNING

Lav to opløsninger – en til rengøring og en til desinfektion. Brug en passende stor beholder, da der dannes skum under opløsning af granulatet. Brug lunkent vand 30 °C - 40 °C.

Erisan Oxy+	Vand	Koncentration
1 brev	1 l	5%
1 brev	2,5 l	2%

PROCEDURE FOR ANVENDELSE


Rengøring

- Sænk instrumenterne i opløsningen, så alle overflader er fuldt dækket af væsken.
- Instrumenterne rengøres manuelt mekanisk.
- Skyl grundigt med rent vand.
- Læg til tørre eller tør i et rent fnugfrit klæde, eller forstæt til desinfektion.

Desinfektion

- Sænk instrumenterne i det næste kar med opløsningen. Igen så alt er fuldt tildækket af væsken.
- Vent reaktionstiden for den ønskede effekt. Fra 15 – 24 timer. Afhænger af blandingens koncentration og instrumentet egenskaber og kontamination.
- Skyl grundigt med rent steril eller demineraliseret vand.
- Læg til tørre eller tør i et rent fnugfrit klæde.
- Pak evt. til sterilisation.

Erisan Oxy+	Op-løsning	Note	Holdbarhed for ubrugt opløsning
Desinfektion af overflader og medicinsk udstyr	1 brev/ 2,5 l vand 1 brev/1 l vand	2% 5%	Bakterier, noro- og adenovirus, gærsvampe 2% fungi 5% 7 dage 2 dage
Områder kontamineret med kropsvæsker	1 brev/2,5 l vand 1 brev/1 l vand	2% 5%	2-step 1-step 7 dage 2 dage
Desinfektion af instrumenter (henstand) og tandproteser	1 brev/2,5 l vand 1 brev/1 l vand	2% 5%	Bakterier, mykobakterier, noro- og adenovirus, gær 2% i 30 min. eller 5% i 15 min. i tildækket beholder Skyl efter med rent vand 7 dage 2 dage Udskift dagligt eller oftere ved behov
High Level desinfektion	1 brev/1 l vand	5%	30 min (polio og sporer). Skyl med rent eller steril vand 2 dage Brug kun opløsning en gang
Ultralydsrensere	1 brev/2,5 l vand 1 brev/1 l vand	2% 5%	30 min (total iblødlægningstid), skyl 15 min (total iblødlægningstid), skyl Udskift dagligt
Dentalt sugesystem	1 brev/2,5 l vand	2%	Brug 1 liter færdigblandet opløsning, skyl af næste morgen
Vask og desinfektion af tekstiler	1 brev og halv mængde vaskemiddel i doseringskuffen	0,5%	Vaskemaskine, 40-60°C på normalt vaskeprogram (5 kg vasketøj)

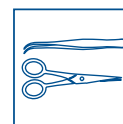

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com | www.hounisen.com



0537