


Anvendelse

Vitrex Sterilance Lite III er beregnet til at foretage kapillærebloodprøver til in vitro diagnostik fx for blodsukker. Lancetterne er sterile og kun til engangsbrug, benyt ikke hvis beskyttelseshætten er brudt.

Bemærk, at denne brugsanvisning ikke erstatter manualen, der følger med produktet.

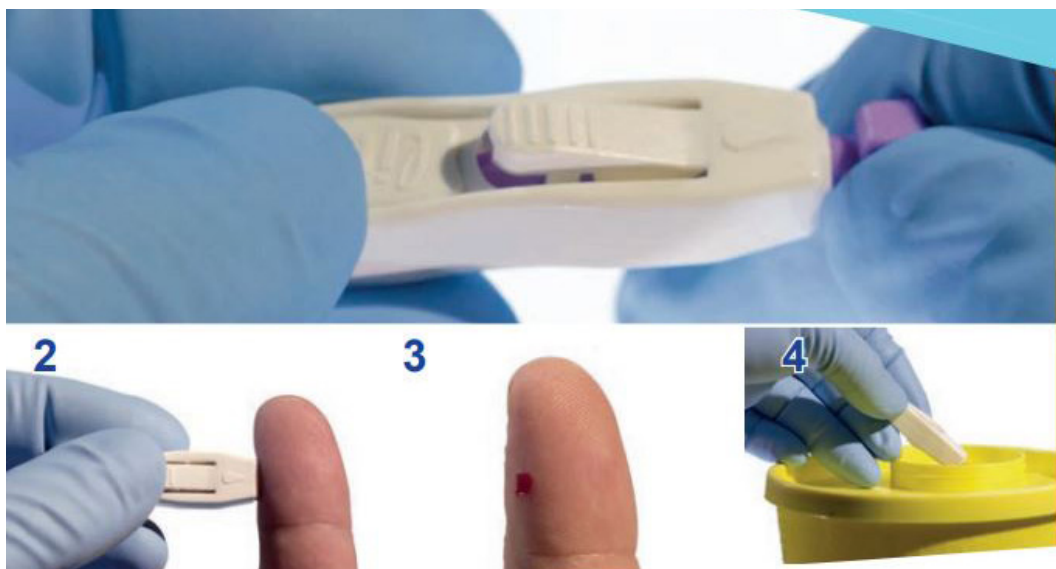

21 G / 1,8 mm

Varenr: 0211.3772

Brugsanvisning

- 1) Twist beskyttelseshætten af.
- 2) Vælg en passende finger og placér lancettens spids på siden af fingerspidsen for at mindske ubehag efter stikket.
- 3) Hold lancetten fast mod fingeren og tryk på udløserknappen i bunden af lancetten.
- 4) Massér forsigtigt fingeren mod stikhullet, for at få bedste blodgennemstrømning og den ønskede mængde blod.
- 5) Lancetten skal bortskaffes sikkert i en kanylebøtte.

Vitrex Sterilance Lite III

- Fuldt beskyttet nål før og efter brug
- Forspændt tryk, let at aktivere
- Fast præcis stikdybde
- Kun til engangsbrug
- Steriliseret ved gammaradiation.
- Lynhurtig penetration
- Ultraskarp tri-bevel nål



28 G / 1,8 mm

Varenr. 0211.3742

Nåltykkelse: Fås i forskellige størrelser fx. 21 G og 28 G.
Stikdybde: Fås i 1,8 mm eller 2,4 mm
Overholder: EN 1041:2013 and ISO 15223-1:2016
Directive 93/42 EEC

Kilde og billede: Vitrexmedical produktbrochure
Hounisen version 1, 23.03.2022