

24-timers blodtryksmåler
Hounisen varenummer 0011.0009

1) Programmering af Boso TM-2450 enheden i softwaren boso profil-manager XD

- Tilslut TM-2450 enheden til PC via USB-kabel.
- Start programmet **boso profil-manager XD**. Det ligger sandsynligvis med boso ikon på PC'ens skrivebord. Se evt. vejledningen til installation, CD er leveret med apparatet.
- Tjek at der øverst til højre står **24h-måling**, ellers klik anvendelse og 24h-måling.
- Sørg for at være på fanen patient og vælg den ønskede patient, eller klik på Ny. Indtast data for den nye patient. Efterfølgende kan patientens data rettes eller slettes ved at højreklikke på patienten.
- Tjek at den ønskede patients data står øverst i billedet.
- Klik - måledata i menuen lige under patientdata.
- Klik - programmer i nederste højre hjørne
- Standardindstillingerne vises. Ønskes andre indstillinger til den enkelte patient, er det her indstillingerne kan ændres fx, tidspunkter for dag/nat, måleintervaller eller maksimal oppumpningshøjde. Klik ok.
- Boksen med Attention, viser at tidligere programmering af TM-2450-enheden slettes og erstattes med den nye programmering.
- TM-2450 enheden er nu klar til brug, og kan frakobles PC.

2) Boso TM-2450-enhed og manchette

- Placer manchetten på patientens arm, så det gule mærke ligger over arteria brachialis. Ledningen vender opad og lægges bag patientens nakke. Lufttilslutningen tilsluttes boso TM-2450 apparatet. Brug overarmsmanchette, der passer både patient og boso TM-2450
- Sørg for, at der er batteri på og tænd displayet ved et tryk på **START/STOP**.
- Lav en testmåling og tryk på **START/STOP** knappen på TM-2450 enheden. (går den ikke i gang så tryk en ekstra gang på **START/STOP**).
- Start døgnmålingen med de valgte intervaller ved at holde den sorte autoknap nede til der lyder et lille bip og et ur-ikon vises i displayet. Målingerne er nu startet og første automatiske måling starter efter det valgte interval (standard 15 min).
- Der kan laves ekstra manuelle målinger mellem de planlagte ved at aktivere displayet på **START/STOP** og derefter sætte en måling i gang på **START/STOP**.
- Displayet vil gå ud efter noget tid, det betyder ikke noget. Det tændes ved tryk på **START/STOP**.

Apparatet pumper automatisk manchetten til et passende niveau, er det ikke nok pumper den igen med yderligere 60 mmHg (maks 300 mmHg). Via softwaren er det muligt at indstille til et andet maksniveau.

3) Indlæsning af data til PC

- Forbind TM-2450 enheden og PC via USB-kabel.
- Start boso profil-manager XD.
- Vælg den patient, hvis data skal indlæses.
- Klik **Måledata** i øverste menu under patientdata.
- Klik **Indlæs måleværdier**, findes i nederste højre hjørne.
- I menuerne øverst under patientdata kan findes alle måledata, grafiske og statistikker
- Overfør, print eller gem data som PDF.

boso TM-2450

24-timers blodtryksmåler

Hounisen varenummer 0011.0009

Ved køb af boso TM-2450 modtager du følgende:



24-timers blodtryksmåleapparat
boso TM-2450

Æske



Batterioplader

4 genopladelige batterier



Overarmsmanchetter til voksne
Str. M (20-31 cm)
Str. L (28-38 cm)

Hoftetaske
Med bæltestropper og
aftagelig skulderstrop



Manualer
- boso TM-2450
- profil-manager XD
- vigtig information
- batterilader

CD-ROM

-boso profil-manager XD



USB-kabel