

boso classic

Klassisk manuel blodtryksmåler

Varenummer 0011.0026

ANVENDELSE

Non-invasiv måling af blodtryk på overarm. Apparatet anvendes til at måle systolisk og diastolisk blodtryk.

Anvendes kun sammen med original boso manchetter. Apparatet betjenes af sundhedsfagligt personale, men kan også anvendes til hjemmemålinger med grundig introduktion af fagperson.



KORT BRUGSANVISNING

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

1. Husk stetoskop.
2. Monter mancetten på patientens overarm.
3. Hold hånden på pumpebolden og tommel- og pegefinger på ventilskruen.
4. Luk ventilen – drej med uret
5. Pust manchetten op ved at pumpe på bolden, pump til der ikke længere er blodgennemstrømning, dvs. til den bankende lyd af pulsen stopper. Hold øje med manometeret og pump på intet tidspunkt over 300 mmHg.
6. Åben ventilen en smule (drej mod uret), og se langsomt fald i trykket på manometeret, mens der lyttes i stetoskopet.
 - a. Systolisk blodtryk; første pulsslag (korotkofflyd)
 - b. Diastolisk blodtryk; auskulatorisk stilhed.
7. Åben ventilen helt, så manchetten tømmes.
8. Vent to minutter før ny måling.

FORBEREDELSE / PATIENT

9. Sid bekvemt, kryds ikke benene
10. Vær så afspændt som muligt.
11. Hvil armene på bord eller armlæn.
12. Træk enden gennem metalbeslaget og vend denne opad og stram til manchetten sidder tæt uden at stramme.
13. Mål altid på samme arm.
14. Manchetten monteres på afklædt overarm
 - a. 2-3 cm over armbøjningen med ledninger nedad.
 - b. Den runde stetoskopmembran skal sidde over overarmens arterie på armens inderside.
 - c. Træk enden gennem metalbeslaget og vend den opad og stram til manchetten sidder tæt uden at stramme.

TEKNISKE DATA

Måleområder:	0 – 300 mmHg
Nøjagtighed:	± 3 mmHg / 2 %
Manometer Ø:	60 mm
Vægt:	575 g
Manchet:	22-32 cm
Kliniske tests:	Opfylder krav til ISO 81060 Part 1
Sikkerhedskrav:	Opfylder krav under CE 0124
Opbevaring:	- 30 °C til + 70 °C, under 85 % RH
Anvendelse:	10 °C til 40 °C, under 85 % RH

BEMÆRK

Pump ikke over 300 mmHg

Målingen må ikke tage over 2 min.

Beskyt mod kraftige stød, beskadigelse og fugt.

Hold 2 min pause mellem målinger

Manchet

Medfølger