


Anvendelse

Non-invasiv måling af blodtryk på håndled. Apparatet måler systolisk og diastolisk blodtryk samt puls. Alle målinger vises i displayet efter endt måling. Bør ikke anvendes på babyer og små børn. Apparatet er ikke valideret til gravide. Apparatet er velegnet til hjemmemålinger, hvor patienten selv er operatør af apparatet.

Kort brugsanvisning

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

1. Indsæt batterier.
 - a. 2 LR3 (AAA) batterier indsættes i toppen af apparatet. Vær opmærksom på + og - og bland ikke nye og gamle batterier.
 - b. På displayet vises batteristatus, når den blinker skal batterierne skiftes.
2. Manchetten påsættes nøgent håndled med displayet på indersiden. Stram til det sidder tæt om håndledet.
3. Slap af, bøjarmen ind foran kroppen så blodtryksmåleren er lige ud for hjertet.
4. Tryk på Start/Stop knappen og målingen starter.
5. Målingen kan til en hver tid stoppes ved at trykke på Start/Stop knappen.
 - a. Automatisk pumpesystem fylder luft i manchetten til ca. 200 mmHg, hvis det ikke er nok - yderligere 50 mmHg.
 - b. Under målingen lukkes luften langsomt ud af manchetten, når målingen er slut tømmes manchetten automatisk helt.
6. Måleresultaterne vises i displayet.
 - a. Systoleblodtryk målt i mmHg
 - b. Diastoleblodtryk målt i mmHg
 - c. Puls målt i antal hjerteslag pr. min.
7. Målingen gemmes automatisk, der lagres op til 90 målinger.

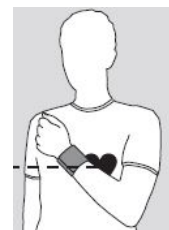

Tekniske data

Måleprincip:	Oscillometrisk
Måleområder:	Blodtryk: 20 – 280 mmHg Puls: 40 – 180 slag/min.
Manchettryk:	0-299 mmHg
Display:	LCD
Power:	2 x LR3 (AAA) batterier
Vægt:	100 g uden batterier
Dimensioner:	(B x H x D) 65 x 70 x 70 mm
Kliniske tests:	Opfylder krav til EN 1060 Part 3

Fejlkoder

Err 1	Stor variation under målingen eller pulsen kan ikke måles. Tjek manchettens placering, hold armen stille, prøv igen.
Err Cuf	Manchetten fyldes ikke korrekt, da den nok er for løs.
Err 9	Intern fejl. Tag batterierne ud, tryk kort på Start,
Err E	Tjek manchettens placering, hold armen stille, prøv igen.



Mål igen, hvis symbolet bliver ved at vises, kan det være indikation på irregulær hjerterytme. Tal med lægen om dette.