

# Brugsanvisning

## boso Uno



Automatisk blodtryksmåler Hounisen varenummer 0011.0010

## Anvendelse

Non-invasiv måling af blodtryk på overarm. Apparatet måler systolisk og diastolisk blodtryk samt puls. Alle målinger vises i displayet efter endt måling. Bør ikke anvendes på babyer og små børn. Apparatet er ikke valideret til gravide. Apparatet er velegnet til hjemmemålinger, hvor patienten selv er operatør af apparatet.

## Kort brugsanvisning

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

1. Indsæt batterier.
  - a. 4 LR6 (AA) batterier indsættes bag på apparatet. Vær opmærksom på + og – og bland ikke nye og gamle batterier.
  - b. På displayet vises batteristatus, når den blinker skal batterierne skiftes.
2. Tilslut manchett til måleenhed, forbindelsen findes på måleenhedens venstre side.
3. Manchetten påsættes patient, på den overarm med det højeste blodtryk.
4. Tryk på Start/Stop knappen og målingen starter. Målingen kan til en hver tid stoppes ved at trykke på Start/ Stop knappen.
  - a. Automatisk pumpesystem fylder luft i manchetten til det korrekte tryk, dog max til 299 mmHg
  - b. Under målingen lukkes luften langsomt ud af manchetten, når målingen er slut tømmes manchetten automatisk helt.
5. Måleresultaterne vises i displayet.
  - a. Systoleblodtryk målt i mmHg
  - b. Diastoleblodtryk målt i mmHg
  - c. Puls målt i antal hjerteslag pr. min.
6. Målingen gemmes automatisk, så sidste måling kan genskabes.  
(Hold Start/Stop nede i 3 sek, sidste måling vises i 5 sek.)
7. Manchetten lukker selv luften ud igen, så den er klar til næste måling.



## Tekniske data

Måleprincip:	Oscillometrisk
Måleområder:	Systolisk: 60 – 279 mmHg Diastolisk: 40 – 200 mmHg Puls: 40 – 180 slag/min.
Manchettryk:	0-299 mmHg
Display:	LCD
Power:	4 x LR6 (AA) batterier
Vægt:	280 g uden batterier
Dimensioner:	(B x H x D) 147 x 64,2 x 110 mm
Kliniske tests:	Opfylder krav til ISO 81060 Part 2
Sikkerhedskrav:	Opfylder krav under IEC 80601-2-30

## Fejlkode

Err	Stor variation under målingen eller pulsen kan ikke måles. Tjek manchettens placering og hold armen stille.
Err Cuf	Manchetten fyldes ikke korrekt, da den nok er for løs.
Err 9 Err E	Intern fejl. Tag batterierne ud, tryk kort på Start, Sæt batterierne i igen. Ved gentagelse send til reparation.



Mål igen, hvis symbolet bliver ved at vises, kan det være indikation på irregulær hjerterytme. Tal med lægen om dette.



lægepraksis

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg  
Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com  
www.hounisen.com/lægepraksis