

hCG quick test

Graviditetstest via teststrimmel

Varenummer 0010.0211

ANVENDELSE

Quicktest baseret på visuel immunanalyse for kvalitativ formodet tilstedeværelse af humant choriongonadotropin (hCG) i urinprøver fra kvinder. Testen er en hjælp til tidlig opdagelse af graviditet og designet til professionelt brug.

Kan detektere hCG i koncentration nedtil 20 mIU/ml svarende til på syvende dagen efter undfangelse.

KORT BRUGSANVISNING


OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

FORBEREDELSE

1. Urin opsamles i prøveglas uden konserveringsmidler.
 - a. Morgenurin anbefales.
2. Urinprøven skal være 15–30 °C, når testen udføres.
3. Urinprøver med tydeligt bundfald skal centrifugeres før test, så der kun testes på homogen og klar urin.
4. Prøven kan opbevares på køl 2-8 °C i op til 48 timer.
5. Teststrimlen skal være 15–30 °C, når testen udføres.
6. Vær opmærksom på at udføre testen straks efter strimlen er taget ud af pakken.
7. Rør kun strimlen i øverste ende og endelig ikke i reaktionsområdet.

TEST

1. Hold teststrimlen i den markerede ende og sænk den lodret i prøven i mindst 10-15 sekunder. Nedsænk ikke længere end til max markeringen. Væsken vandrer selv op til reaktionsområdet.
2. Fjern teststrimlen fra urinprøven og placer den på en tør, ren og ikke sugende overflade.
3. Aflæs svaret efter 5 min. Ved aflæsning senere end 10 min. er svaret ikke pålideligt.

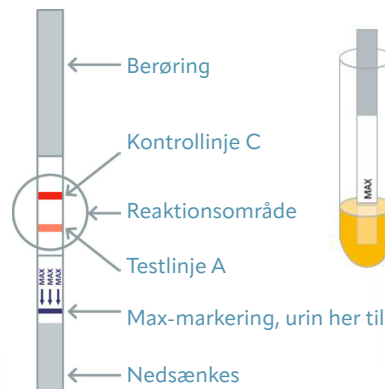


Svar på 5min

> **Dag 7**

RESULTATER

- Positiv:** Der ses farvede bånd ved både C og T. Altså to farvede bånd i reaktionsområdet. Farven ved T kan være lidt lysere end ved C.
- Negativ:** Der ses et farvet bånd ved C og intet ved T.
- Ugyldig:** Der er ikke et farvet bånd ved C. For at være gyldig skal der være en farvet stribe ved kontrol C, uanset om der er farve ved T.

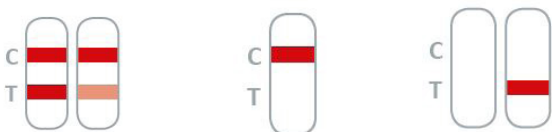

TEKNISKE DATA

Måleprincip:	Kromatografisk immunanalyse
Måleområder:	> 20 mIU/ml
Prøvemateriale:	Urin, gerne morgenurin
Svartid:	5 min.
Prøvetemperatur:	15–30 °C
Opbevaring:	2 – 30 °C (til udløbsdato, åbent 3 mdr.)
Sikkerhedskrav:	IVD, CE